



Manual de funcionamiento de Motif Twist

1. Introducción

Presentamos Twist

Pequeño, fácil de usar y económico, Twist es el extractor de leche portátil más asequible de Motif; perfecto para que las madres lo usen dondequiera que estén. Con un peso de menos de 250 g, Motif Twist cabe a la perfección en su bolso, para que así pueda extraer leche en cualquier momento que necesite.

Todos los productos de Motif Medical® que se adquieran a través de distribuidores autorizados incluyen una garantía del fabricante que estipula que el producto no tendrá defectos de mano de obra ni de materiales; esta garantía es de 2 años en el caso de los extractores de leche eléctricos dobles, de 1 año en el caso de las baterías internas, y de 90 días en el caso de las partes del extractor de leche.

Tras recibir el extractor de leche, regístrelo en:
motifmedical.com/warranty-registration/



MANUAL DE UTILIZAÇÃO E TUTORIAIS MOTIF TWIST

Índice

1.	Introducción	2
2.	Características principales	7
3.	Uso previsto (instrucciones de uso)	8
4.	Símbolos	9
5.	Seguridad	10
5.1	Prohibiciones, advertencias y precauciones	10
6.	Partes	13
6.1	Qué se incluye	13
6.2	Funciones	15
6.3	Configuración y modos	16
7.	Esterilización y limpieza	17
8.	Funcionamiento del extractor de leche	20
8.1	Tamaño de la pezonera	20
8.2	Ensamble del extractor Twist	23
8.3	Cómo usar el extractor doble	25
8.4	Encendido y apagado del extractor Twist	26

9.	Uso del extractor Motif Twist	27
9.1	Guía de extracción	27
9.2	Preparación para la extracción	28
9.3	Alineación de la pezonera	29
9.4	Extracción de la leche	30
9.5	Después de la extracción	31
9.6	Almacenamiento de la leche materna	32
10.	Solución de problemas	34
10.1	Solución de problemas	34
10.2	Eliminación	36
10.3	Cuándo reemplazar las partes	37
11.	Garantía	39



2. Características principales

El extractor de leche eléctrico doble Motif Twist utiliza un sistema de vacío para extraer la leche materna.

Extracción de leche en cualquier lugar

Opciones de alimentación doble. Use la alimentación fija o a batería.

Diseño ultra ligero

Con un peso de menos de 250 g, ofrece una portabilidad perfecta.

Extraiga la leche como quiera

Opciones de extracción simple o doble y un patrón de succión ajustable diseñados para estimular al máximo la bajada de la leche.

Sistema cerrado

La protección contra reflujo mantiene la limpieza del motor y los tubos, lo que evita la contaminación.

Motor silencioso

Sin ningún zumbido fuerte. Ideal para una extracción de leche discreta.

3. Uso previsto (instrucciones de uso)

El extractor de leche eléctrico doble Motif Twist está dirigido a las mujeres lactantes que desean extraer y recolectar su leche materna. El dispositivo Twist puede usarse como extractor simple o doble.

Este aparato no está diseñado para que lo usen personas con capacidades mentales, sensoriales o físicas reducidas, ni tampoco niños, a menos que se encuentren bajo la supervisión o las instrucciones de personas encargadas de su seguridad.

Lea por completo este documento y siga las instrucciones al pie de la letra. Para prevenir lesiones personales y daños materiales, respete las advertencias y la información de seguridad que se entregan en este documento.



Precaución: Para evitar lesiones menores, siga estas recomendaciones:

- El hecho de compartir un extractor de leche podría generar peligros para la salud y anular la garantía del fabricante.

4. Símbolos



Advertencia: Situación potencialmente peligrosa que podría provocar lesiones graves.



Precaución: Situación posiblemente peligrosa que podría provocar lesiones corporales leves



Aviso: Información útil que debe conocer para usar este producto



Fabricante



Fecha de fabricación



Número de serie



Consulte el manual de funcionamiento



Parte aplicada tipo BF



Equipo Clase II



No exponer a la humedad

IP22

Grado de protección contra el ingreso perjudicial de agua o materia particulada.



Este producto no debe mezclarse con otros desechos comerciales para su eliminación

5. Seguridad

5.1 Prohibiciones, advertencias y precauciones



Prohibición: Para no anular la garantía, siga estas recomendaciones:

- No modifique este equipo sin la autorización del fabricante.
- No desensamble ni modifique el producto. El dispositivo no tiene partes que pueda reparar el usuario.



Advertencia: Para evitar incendios, electrocución o quemaduras graves, siga estas recomendaciones:

- No deje el producto sin supervisión si está conectado a una toma de corriente.
- Es necesario supervisar con atención el producto si se usa cerca de niños o personas con discapacidades.
- Deje el producto fuera del alcance de los niños.
- Use el producto solamente para su uso previsto tal como se describe en este manual. No use ningún accesorio que no haya recomendado el fabricante.
- Nunca opere este producto si tiene un cable o una clavija dañados, si no funciona correctamente o si se ha caído al piso o dañado, o si se ha caído al agua.
- Mantenga el cable lejos de cualquier superficie caliente.
- Nunca use el dispositivo mientras duerme o si tiene sueño.
- Nunca introduzca ningún objeto en ninguna abertura o tubo.
- No utilice el dispositivo en el exterior, donde se usen productos de aerosol (rociado), o donde se administre oxígeno.
- Revise siempre los cables del adaptador de corriente antes de usarlos para comprobar que no estén dañados ni expuestos. Si se detectan daños, deje de usar de inmediato el adaptador de corriente y comuníquese con el servicio al cliente de Motif Medical®.
- El dispositivo Twist de Motif Medical® debe colocarse de manera tal que resulte fácil operar el adaptador.



Advertencia: Para disminuir el riesgo de electrocución, siga estas recomendaciones:

- Desconecte de inmediato el producto después de usarlo.
- No use el dispositivo mientras se baña.
- No coloque ni almacene el producto donde pueda caerse en una bañera o un fregadero.
- No coloque ni deje caer el producto en agua ni en otro líquido.
- No intente tomar el producto si se cayó al agua. Desconéctelo de inmediato de la toma de corriente.



Advertencia: Para evitar riesgos para la salud y disminuir el riesgo de lesiones, siga estas recomendaciones:

- Si es madre y está infectada con hepatitis B, hepatitis C o el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), la leche materna extraída no disminuirá ni eliminará el riesgo de contagiar el virus al bebé.
- Antes de cada uso, compruebe que los componentes no tengan grietas, picaduras, rasgaduras, decoloración o deterioro. Si observa daños en el dispositivo, deje de usarlo hasta haber reemplazado las partes.
- Este producto está diseñado para que solo un usuario lo use y no debe compartirse entre usuarios.
- No conduzca mientras utiliza el extractor.
- No use nunca el dispositivo mientras está embarazada, ya que podría inducir el parto.
- Limpie y desinfecte todas las partes que vayan a entrar en contacto con el pecho y la leche materna antes de usar el dispositivo por primera vez.
- Lave todas las partes que hayan entrado en contacto con el pecho y la leche materna después de cada uso.
- No siga utilizando el extractor durante más de 2 sesiones consecutivas si no logra resultados.
- No descongele la leche materna congelada en un microondas ni en una sartén con agua hirviendo.
- Si aparecen mohos en los tubos, suspenda el uso y reemplácelos por tubos nuevos.
- Si se acumula la leche materna, es necesario limpiar los tubos antes de la próxima sesión de extracción.



Precaución: Para evitar lesiones menores, siga estas recomendaciones:


- No enrolle el cable alrededor del cuerpo del adaptador.
- Use solamente el adaptador de corriente que se incluye con el extractor de leche eléctrico.
- Utilice el extractor en posición vertical solamente.
- No acorte los tubos.
- Asegúrese de que la tensión del adaptador de corriente sea compatible con la fuente de alimentación.
- Primero conecte el adaptador de corriente al extractor de leche y luego a la toma de corriente de la pared.
- No use limpiadores ni detergentes antibacterianos o abrasivos mientras limpia el extractor de leche o las partes de este.
- Nunca coloque el motor del extractor de leche en agua ni en un esterilizador, ya que podría dañar el extractor de manera permanente.
- No intente retirar la pezonera mientras utiliza el dispositivo. Apague el extractor de leche y rompa el sello entre el pecho y la pezonera con el dedo, y luego retire la pezonera.
- Si durante el proceso de extracción no se siente cómoda o siente dolor, apague la unidad, rompa el sello entre el pecho y la pezonera con el dedo y retire la pezonera.
- Las botellas y los componentes de plástico se vuelven frágiles al congelarse y podrían romperse si se caen al piso.
- Las botellas y los componentes podrían dañarse si se manipulan de manera incorrecta; por ejemplo, si se caen al piso, si se aprietan en exceso o si se vuelcan.
- Manipule las botellas y los componentes con cuidado.
- No use la leche materna si las botellas o los componentes sufren daños.

6. Partes


6.1 Qué se incluye

- i** Mientras abre la caja, asegúrese de que se incluyan los siguientes componentes.

- 1** Extractor de leche eléctrico, Motif Medical® Twist
- 2** Tubos (2)
- 3** Conector de tubos (4)
- 4** Parte superior del diafragma (2)
- 5** Diafragma (2)

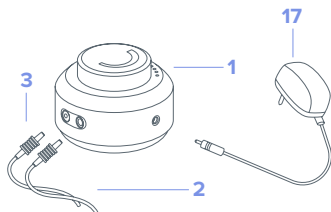

- 6** Pezoneras de 24 mm, 28 mm y 32 mm (2 de cada una)
- 7** Conector de pezonera (2)
- 8** Anillo de botella (2)
- 9** Válvula (2)
- 10** Membrana (2)
- 11** Envase de almacenamiento (2)

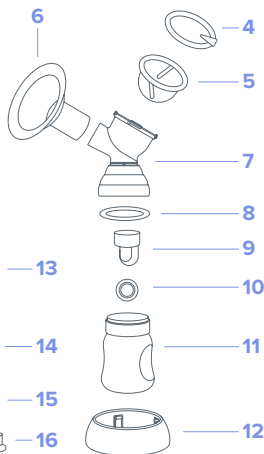

- 12** Base de envase de almacenamiento (2)
- 13** Tapa de botella (2)
- 14** Tetina de botella (2)
- 15** Disco sellador (2)
- 16** Cubierta tipo rosca (2)
- 17** Adaptador de corriente

- Kits de recolección de leche de 140 ml (2)

6. PARTES

Accesorios y partes adicionales disponibles para el extractor de leche Twist:

- Kit de reposición completo con repuestos
- Partes individuales



Visite motifmedical.com/replacement-supplies/ para encontrar repuestos y suministros adicionales del dispositivo Twist.

6.2 Funciones

Temporizador de 30 min


(10 luces LED azules, de 3 minutos cada una)



Potencia mínima (potencia de succión mínima)



Luz blanca (indica la potencia de succión)

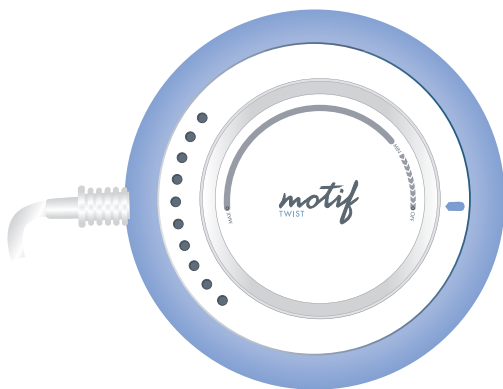

Potencia máxima (potencia de succión máxima)



Encendido/Apagado (gire para encender o apagar el dispositivo)



Modos (Línea discontinua: masaje) (Línea continua: extracción)

6.3 Configuración y modos

El nivel del ciclo hace referencia a la cantidad de movimientos de extracción completos que realizará el dispositivo por minuto; se mide en ciclos por minuto (CPM). Los ciclos por minuto cambian a medida que aumenta la intensidad de succión.

Configuración de succión

El nivel de succión del extractor de leche hace referencia a la intensidad de succión, que se mide en mm-Hg. Al usar el dispositivo Twist de Motif Medical®, se dará cuenta de que la extracción es más eficaz en el nivel de succión más alto con el que se sienta cómoda.

Sin embargo, es importante no elegir un nivel de succión tan alto que la haga sentirse incómoda, ya que el dolor que sienta impedirá que fluya la leche.

Modo de masaje

Patrón de succión con ciclos rápidos y vacío bajo que estimula la bajada y el flujo de la leche. Una línea discontinua en el dispositivo Motif Twist indica que el modo de masaje está activado.

Modo de extracción

Patrón de succión con ciclos más lentos y mayor vacío que permite extraer la leche de manera suave y eficiente. Una línea continua en el dispositivo Motif Twist indica que el modo de extracción está activado.

7. Esterilización y limpieza

i Antes del primer uso, esterilice las siguientes partes:

- Diafragmas
- Pezoneras
- Tapas de botellas
- Válvulas
- Botellas
- Tetinas

*** No esterilice ni lave los tubos.**

Repita la esterilización de las demás partes indicadas una vez al día tras usar el extractor.

Instrucciones de esterilización

1. Si ya ha utilizado anteriormente las partes, primero siga las instrucciones de limpieza.
2. Coloque las partes del extractor de leche en una olla y cúbralas con agua.
3. Hierva el agua y deje hervir durante 5 minutos.
4. Retire las partes con unas tenazas limpias.
5. Coloque las partes del extractor sobre una toalla de papel limpia o un paño de cocina y deje que se sequen por completo con aire.

i Las partes también pueden esterilizarse en un esterilizador por vapor o una bolsa esterilizadora para microondas para esterilizarlas con rapidez y eficiencia.

i No coloque los tubos en las bolsas esterilizadoras para intentar limpiarlos.

Instrucciones de limpieza

1. Lávese bien las manos con agua tibia y jabón.
2. Desensamble cada una de las partes del extractor de leche que haya tenido contacto con la leche materna. Aquí se incluyen las válvulas, las botellas, las pezoneras y las tetinas. ***No limpie los tubos ni los diafragmas. Los diafragmas no deben limpiarse, a menos que se acumule leche o humedad en ellos. Si aparece leche o humedad en los tubos, reemplácelos lo antes posible. Lávelos y cuélguelos para que se sequen si los necesita volver a usar antes de reemplazarlos. Asegúrese de que los tubos estén secos antes de usarlos. La humedad presente en los tubos podría entrar al extractor y dañar el motor.**
3. Enjuague cada parte con agua fría para eliminar los residuos de leche.
4. Opciones para lavar las partes del extractor:
 - Lave por separado cada parte en el fregadero con un cepillo suave y jabón. (Asegúrese de usar un cepillo o un paño nuevos exclusivamente para las partes del extractor de leche).
 - Remoje cada parte en agua tibia con jabón durante 5 minutos y luego enjuáguela bien.
5. Seque las partes con una toalla seca o deje que se sequen por completo con aire sobre una superficie sanitaria, como una toalla de papel limpia o un paño de cocina limpio. No seque a palmaditas.
6. Limpie la parte exterior del extractor de leche con una toalla seca y limpia. ***No lave la parte exterior del extractor de leche con agua ni deje que el extractor se humedezca durante la limpieza.**



No se recomienda lavar y secar las partes del extractor Motif en el lavavajillas. Los lavavajillas no tienen una temperatura estándar y algunos podrían deformar las partes. Las partes que sufran daños en el lavavajillas no están cubiertas por la garantía.

Después de cada uso

1. Lávese bien las manos antes de manipular cada componente del extractor de leche.
2. Desensamble las partes que entren en contacto con la leche materna, como la válvula, la botella, la tetina, la pezonera, el disco de la botella y la cubierta de la botella.
3. Enjuague cada parte con agua fría para eliminar los residuos de leche.
4. Opciones para lavar las partes individuales:
 - Lave por separado cada parte con un cepillo suave o un paño de cocina limpio.
 - Remoje cada parte en agua tibia con jabón durante 5 minutos y luego enjuáguela bien.
5. Seque las partes con una toalla limpia y/o deje que se sequen por completo con aire sobre una superficie sanitaria.
6. Limpie el cuerpo principal con una toalla limpia y seca después de cada uso. ***Nunca use agua para lavar la parte exterior del extractor de leche.**
7. Una vez que se hayan secado por completo, almacene las partes en una bolsa o un contenedor limpios. ***No almacene las partes que estén húmedas.**

8. Funcionamiento del extractor de leche

8.1 Tamaño de la pezonera

Importancia del tamaño

El proceso de extracción no debe doler. Esta guía es un punto de partida que le ayudará a determinar el tamaño óptimo de la pezonera según el diámetro del pezón.

Cómo encontrar la pezonera del tamaño correcto


Paso 1

Con una regla o una cinta de medir, mida el diámetro del pezón desde la base (por el medio) en milímetros (mm).

Paso 2

Agregue 4 mm para determinar el tamaño de la pezonera.

Ejemplo: Si el pezón es de 26 mm de diámetro, el tamaño recomendado de la pezonera es 30 mm.

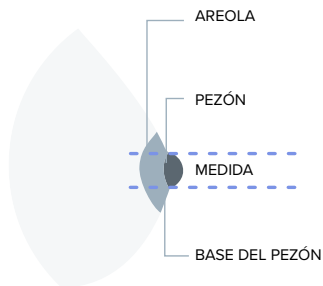

*1 cm = 10 mm

No incluya la areola.

Vea a continuación el tamaño recomendado de la pezonera según sus medidas:



Verificación del tamaño de la pezonera



Demasiado pequeña

Durante la extracción de leche, una parte o la totalidad del pezón roza los costados del túnel de la pezonera.



Ajuste correcto

Durante la extracción de leche, el pezón puede moverse libremente en el túnel de la pezonera. Hay espacio alrededor del pezón y una pequeña parte de la areola se introduce en el túnel con el pezón.



Demasiado grande

Durante la extracción de leche, la mayoría de la areola se introduce en el túnel de la pezonera con el pezón. Es posible sentir que la areola roza el costado del túnel de la pezonera.

¿Debo probar una pezonera de otro tamaño?



- ¿El pezón roza los costados del túnel al punto de causarle molestia?
- ¿La areola se introduce demasiado en el túnel?
- ¿Aparece enrojecimiento?
- ¿El pezón o la areola se ponen de color blanco?
- ¿Siente que le queda leche tras usar el extractor?

Si respondió “Sí” a cualquiera de estas preguntas, debería probar un nuevo tamaño de acuerdo a las instrucciones de medición anteriores.

Si aun así no sabe si seleccionó el tamaño correcto, consulte con un asesor en lactancia o un especialista en amamantamiento para que le ayude a elegir la pezonera del tamaño correcto.

8.2 Ensamble del extractor Twist


1. Lávese las manos antes de tocar los componentes del extractor de leche.
2. Introduzca la membrana en la válvula hasta que quede completamente plana.
3. Coloque la válvula en el conector y asegúrese de lograr un sello hermético.
4. Coloque el diafragma sobre el conector.
5. Conecte la parte superior del diafragma colocándola sobre el diafragma.
6. Inserte el conector de los tubos y conecte los tubos al diafragma.
7. Atornille el envase de almacenamiento al conector.

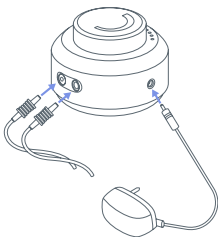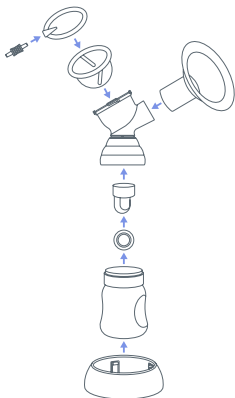

8. Inserte el conector de los tubos en el puerto de los tubos del extractor de leche.
9. Inserte el conector de CC del cable de alimentación en el puerto de CC del extractor, luego inserte el cable USB en el adaptador del conector USB y conéctelo a una toma de corriente.
10. Tras extraer la leche, almacénela en el refrigerador y limpie el extractor de leche. Asegúrese de que todos los componentes eléctricos estén secos.


Instalación de las baterías

1. Abra la cubierta de las baterías girándola hacia la izquierda, instale cuatro baterías AA y cierre la cubierta.
2. Alinee la flecha de la cubierta de las baterías con la flecha de la base y gírela hacia la derecha para cerrarla.

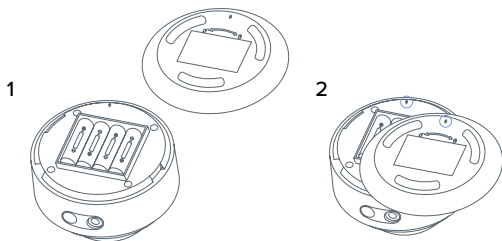


i Asegúrese de apagar el extractor y desensamblar las partes cuando no se encuentre en uso.

8.3 Cómo usar el extractor doble

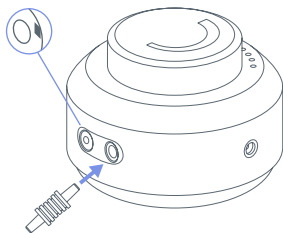

Mientras realiza una extracción simple, asegúrese de insertar el conector de los tubos en el puerto ubicado en el lado derecho.

No use el puerto del lado izquierdo que tiene el botón negro, ya que podría disminuir la succión.

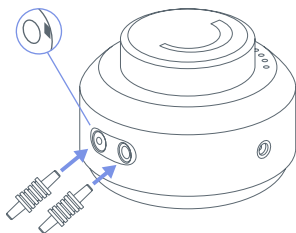

Si realiza una extracción doble, conecte ambos conectores de los tubos a los puertos y asegúrese de que el conector presione por completo el botón negro del puerto izquierdo, ya que esto permitirá generar succión en ambos lados del extractor.

8.4 Encendido y apagado del extractor Twist

1. Gire el dial del cuerpo del extractor. Se encenderá el dispositivo.
2. Comience la extracción en el modo de masaje. Para ello, coloque el dial entre la posición mínima y el punto intermedio.
3. Para pasar al modo de extracción, coloque el dial entre el punto intermedio y la posición máxima.
4. Mueva el dial para ajustar la succión a su nivel de comodidad preferido.
5. Si desea dejar de extraer leche, haga lo siguiente:
 - Gire el dial para apagar el extractor, luego retire la pezonera y el kit de recolección de leche del pecho.

9. Uso del extractor Motif Twist

9.1 Guía de extracción

 Incluso si utiliza el extractor de leche, se recomienda amamantar al bebé cuando sea posible.

- Masajee suavemente sus pechos o aplique compresas tibias desde el pecho hasta el pezón antes de comenzar la sesión de extracción.
- Extraiga leche de cada pecho durante 10 a 15 minutos. Se recomienda extraer la leche con frecuencia y no durante mucho tiempo (cada 2 a 3 horas, 8 veces al día).

9.2 Preparación para la extracción

1. Compruebe que está utilizando la pezonera del tamaño correcto. Consulte la sección **8.1: Tamaño de la pezonera para obtener más detalles**.
2. Lávese bien las manos.
3. Compruebe que los componentes no estén dañados ni desgastados antes del uso y reemplácelos si es necesario.
4. Ensamble la pezonera, el diafragma y la botella según las instrucciones y conéctelos al cuerpo del extractor a través de los tubos.
5. Asegúrese de que los tubos estén bien conectados para evitar fugas de aire.
6. Compruebe el nivel de la batería antes del uso para asegurarse de que el dispositivo esté completamente cargado.
7. Masajee el pecho durante unos 5 minutos con una toalla tibia para facilitar la extracción.

9.3 Alineación de la pezonera



Centre la pezonera en su pecho, de manera que el pezón se introduzca en el túnel de la pezonera.

Es importante colocar de manera correcta la pezonera antes de comenzar a extraer la leche, para así no sentir dolor si el pezón se tuerce o roza con el costado de la pezonera. Si va a realizar una extracción doble, coloque la segunda pezonera.

Si le preocupa el ajuste o quiere asegurarse de haber colocado correctamente la pezonera, consulte la subsección “Verificación del tamaño de la pezonera” de la sección **8.1: Tamaño de la pezonera**.

Aunque podría sentir un poco de incomodidad la primera vez que utilice un extractor de leche, no debería doler. Si no está segura del tamaño de la pezonera, comuníquese con un profesional médico o un representante de Motif Medical que pueda ayudarle a obtener el ajuste correcto.

9.4 Extracción de la leche

1. Encienda el extractor de leche para comenzar con la extracción.
2. Es fundamental que la bajada de la leche sea suficiente para una extracción exitosa. Para lograr esto, comience la extracción con el dial entre la posición mínima y el punto intermedio.
3. Tras lograr la bajada de la leche, aumente la succión colocando el dial entre el punto intermedio y la posición máxima; esto le permitirá pasar al modo de extracción.
4. Una sesión de extracción normal dura entre 15 y 30 minutos, pero varía en función de cada madre.
5. Tras la sesión de extracción, apague el dispositivo y deslice un dedo entre su pecho y la pezonera para separarlos.

9.5 Después de la extracción

Después de cada sesión de extracción, asegúrese de guardar el producto. Nunca intente limpiar ni esterilizar las partes del extractor si se encuentra ensamblado; limpie y esterilice cada parte de manera individual.



1. Gire el diafragma para retirarlo de la pezonera.
2. Retire la pezonera de la botella recolectora de leche y cierre bien la botella con la cubierta y el disco, y almacénela de manera segura.
3. Retire los tubos del diafragma y del extractor de leche.
4. Asegúrese de que los tubos no estén expuestos a la humedad y de que esta no ingrese a los mismos. Almacene los tubos en una bolsa o un recipiente limpios. **No enrolle los tubos alrededor del extractor de leche.**

9.6 Almacenamiento de la leche materna

- i** Al almacenar la leche materna en una bolsa, asegúrese de escribir en esta con rotuladores no tóxicos.

		Lugar de almacenamiento/Temperatura		
		Temperatura ambiente 77°F (25°C) o menos	Refrigerador 40°F (4°C)	Congelador 0°F (-18°C) o menos
Tipo de leche materna	Extraída recientemente	0 - 4 horas	0 - 4 días	0 - 6 meses es lo ideal 6 - 12 meses es aceptable
	Descongelada	1-2 horas	0 - 24 horas (1 día)	Nunca vuelva a congelar la leche materna tras haberse descongelado
	Restos (el bebé no terminó la botella)	0 - 2 horas después de que el bebé haya terminado de beber		

Fuente: CDC.gov

Cómo descongelar la leche materna

1. Revise siempre la fecha que aparece en el envase de leche antes de usarlo. No use leche sin fecha ni leche que se haya almacenado más tiempo del recomendado.
2. Descongele la leche en el refrigerador o con un chorro de agua fría.
3. Caliente la leche con un chorro de agua tibia y mueva suavemente el envase para mezclar la leche. No agite la botella.
4. Si no dispone de agua tibia, caliente una olla con agua en la estufa. Una vez que el agua esté tibia (no debe hervir), retire la olla de la estufa y coloque el envase de leche en la olla. Nunca caliente el envase de leche directamente sobre la estufa.
5. Nunca caliente la leche materna en un microondas, ya que podría provocar puntos calientes peligrosos que podrían quemarla a usted o al bebé.
6. Compruebe siempre la temperatura de la leche con la parte interna de la muñeca antes de alimentar al bebé. La leche debe sentirse tibia, no caliente.
7. Tras descongelarla, la leche debe almacenarse en el refrigerador durante 24 horas como máximo.
8. Nunca vuelva a congelar la leche descongelada. Deseche la leche previamente congelada que no se utilice en 24 horas.

10. Solución de problemas

10.1 Solución de problemas

A continuación, encontrará problemas generales que podrían producirse con el dispositivo Motif Twist y sus correspondientes soluciones.

Problema	Causas posibles	Verificación	Solución
No hay energía	Adaptador	Verifique que el cable de alimentación esté conectado y que no esté dañado.	Conéctelo a la toma de corriente. Si hay daños, comuníquese con el servicio al cliente de Motif al 844-272-8390 o con el lugar donde compró el extractor.
	Perilla de encendido	Verifique que no haya objetos extraños en la perilla de encendido y en el exterior del extractor. Asegúrese de que el adaptador de corriente esté conectado correctamente.	
	Baterías	Reemplace las baterías por baterías nuevas completamente cargadas.	
No hay succión	Tubos	Verifique que los tubos estén conectados al cuerpo principal.	Conecte el tubo de aire al cuerpo principal.
	Válvula	Verifique que las válvulas estén conectadas correctamente a la pezonera.	Desensámblelas y vuelva a ensamblarlas correctamente.
	Tapón del puerto de flujo de aire	Verifique que el tapón del puerto de flujo de aire esté cerrado.	Cierre el tapón del puerto de flujo de aire.
El cuerpo principal se humedece		Desconecte el adaptador de corriente de la toma de corriente. Apague el extractor de leche. Limpie el cuerpo principal con un paño seco y limpio y almacénelo en un lugar seco y cálido durante 12 horas aproximadamente.	

Problema	Causas posibles	Verificación	Solución
La succión es baja	Nivel de succión	Verifique si hay un nivel de vacío bajo en la válvula reguladora de vacío o si hay un ruido anormal.	Comuníquese con el servicio al cliente de Motif al 844-272-8390.
	Kit de ensamble defectuoso	Verifique la conexión del kit.	Desensámblelo y vuelva a ensamblarlo correctamente.
	Pezonera	Verifique si hay un problema con la pezonera.	Visite motifmedical.com .
	Válvula	Verifique que no haya daños en la cabeza de la válvula.	Reemplace la válvula.
Dolor	La succión es muy alta	Verifique el nivel de succión.	Establezca el nivel de succión más bajo y comuníquese con su asesor en lactancia o su médico.
Hay leche materna en los tubos		Apague el extractor de leche. Desconecte los tubos del diafragma. Retire la leche y los tubos del diafragma.	



Si necesita ayuda adicional para solucionar problemas con el extractor de leche, comuníquese con el departamento de servicio al cliente de Motif Medical®. Podrá hacerlo a través del chat en motifmedical.com, por correo electrónico a hello@motifmedical.com o por teléfono al (844) 272-8390.

10.4 Eliminación

Envíe los componentes que ya no use a Motif Medical o elimine el dispositivo de manera correcta de acuerdo con las normativas locales, estatales y federales.



Al igual que con los equipos eléctricos y electrónicos, el dispositivo debe eliminarse de acuerdo a un procedimiento especializado de recolección, retiro y reciclaje o destrucción según la Directiva 2012/19/EU del Consejo Europeo sobre Desechos de Equipos Eléctricos y Electrónicos (WEEE).

10.5 Cuándo reemplazar las partes

La frecuencia con la que debe reemplazar los suministros del extractor de leche varía según la frecuencia con la que utiliza el dispositivo. Por ejemplo, una madre que extrae leche unas 9 veces al día y desinfecta el extractor con mayor frecuencia que una madre que solamente extrae leche 3 a 4 veces al día deberá reemplazar las partes con mayor frecuencia.

 Una buena referencia es reemplazar las partes cada 90 días.

Reemplazo de los tubos del extractor de leche

A medida que los tubos se estiran y se desgastan con el tiempo, podría verse afectada la intensidad de succión del extractor de leche.

- Si los tubos se deslizan con facilidad por el motor y el protector de reflujo, es hora de reemplazarlos.
- Si hay humedad en los tubos, también debe reemplazarlos de inmediato.
- No hay manera de esterilizar por completo los tubos para evitar que se acumulen bacterias al interior, y la humedad podría dañar el motor del extractor de leche.

Reemplazo de las válvulas

Las válvulas de silicona (las membranas o pequeñas solapas blancas de las válvulas) deben reemplazarse entre 1 a 3 meses según la frecuencia de uso, ya que podrían afectar la potencia de succión.

- Las membranas deben reemplazarse cuando no queden planas sobre las válvulas.
- Es importante recordar que las partes más pequeñas del extractor de leche podrían no presentar daños visibles.

Reemplazo de los protectores de reflujo

Las membranas que hay al interior de los protectores de reflujo podrían estirarse y perder la elasticidad con el tiempo, por lo que perderían eficacia a la hora de impedir el ingreso de humedad en el motor del extractor de leche.

- Deben reemplazarse entre 3 a 6 meses, en función del uso.
- Si ve rasgaduras, deformación, cortes o decoloración, es hora de reemplazarlas.

Reemplazo de las pezoneras (copas)

Las pezoneras acumularán residuos, pueden agrietarse o decolorarse con el tiempo según la frecuencia de uso del extractor.

- Deben reemplazarse cada 6 meses.
- Sin embargo, si detecta grietas, rasgaduras o deformación, tal vez sea necesario reemplazarlos antes.
- La decoloración no afecta el funcionamiento del extractor, pero tal vez no sea visualmente atractiva.

11. Garantía

Tras recibir el extractor, regístrelo en motifmedical.com/product-registration


Todos los productos de Motif Medical® que se adquieran a través de distribuidores autorizados incluyen una garantía del fabricante que estipula que el producto no tendrá defectos de mano de obra ni de materiales; esta garantía es de 2 años en el caso de los extractores de leche eléctricos dobles, de 1 año en el caso de las baterías internas, y de 90 días en el caso de las partes del extractor de leche y el extractor de leche manual.

La única obligación de Motif conforme a esta garantía expresa será, a criterio de Motif, reemplazar o reparar el producto o las partes del mismo (en caso de que el producto no esté disponible, entregar un producto similar).

La garantía comienza en la fecha de compra efectiva y se trata de una garantía sencilla que terminará de acuerdo a esta fecha de entrada en vigencia. La garantía no se ampliará si el producto es reemplazado. La garantía no es transferible. Los extractores de leche de Motif están destinados a un solo usuario, y la garantía solo se aplica al usuario original del extractor.

La garantía cubre los defectos de fabricación. Motif Medical no puede reemplazar una parte del extractor que fue dañada por el usuario final mientras usaba el producto. La garantía no cubre los elementos extraviados o robados, el desgaste normal de las partes del extractor de leche ni los elementos que se usen o almacenen de manera incorrecta. El incumplimiento de las instrucciones de funcionamiento o las alteraciones que se realicen en el producto anularán la garantía.

Los productos cubiertos bajo garantía se envían por correo terrestre estándar. Se encuentra disponible un envío con entrega urgente, en 24 horas o en 2 días por una tarifa adicional. La garantía solamente es válida en Estados Unidos. Los elementos cubiertos bajo garantía solamente se enviarán a direcciones ubicadas en EE. UU.

 Si tiene una pregunta sobre la garantía, llámenos al 844-272-8390, visite nuestra página web motifmedical.com o envíe un correo electrónico a nuestro servicio al cliente a hello@motifmedical.com.



Fabricado para:
Motif Medical®, LLC
8 The Green, Suite 5601
Dover, DE 19901

Teléfono: (844) 272-8390

Correo electrónico:
info@motifmedical.com

Página web:
www.motifmedical.com



Gracias por elegir el extractor
de leche eléctrico doble Motif
Twist®.

(844) 272-8390
info@MotifMedical.com
www.motifmedical.com

Motif Medical®
8 The Green, Suite 5601
Dover, DE 19901