



Manual de funcionamiento de Duo[®]

1. Introducción

Presentamos Duo

Con un peso de menos de 500 g, el extractor Duo es silencioso, cabe en la palma de la mano y puede guardarse con discreción en cualquier bolso. Ya sea si está viajando, trabajando o haciendo varias cosas a la vez, Duo es conveniente, recargable y dura 2 horas y media entre cada carga. Recomendado para usarse en viajes de fines de semana o en el trabajo durante la semana.

Todos los productos de Motif Medical® que se adquieran a través de distribuidores autorizados incluyen una garantía del fabricante que estipula que el producto no tendrá defectos de mano de obra ni de materiales; esta garantía es de 2 años en el caso de los extractores de leche eléctricos dobles, de 1 año en el caso de las baterías internas, y de 90 días en el caso de las partes del extractor de leche.

Tras recibir el extractor de leche, regístrelo en:
motifmedical.com/warranty-registration/



Índice

1.	Introducción	2
2.	Características principales	7
3.	Uso previsto (instrucciones de uso)	8
4.	Símbolos	9
5.	Seguridad	10
5.1	Prohibiciones, advertencias y precauciones	10
6.	Partes	13
6.1	Qué se incluye	13
6.2	Botones y funciones	15
6.3	Configuración y modos	21
7.	Esterilización y limpieza	23
8.	Funcionamiento del extractor de leche	26
8.1	Tamaño de la pezonera	26
8.2	Ensamble del extractor Duo	29
8.3	Cómo usar el extractor doble	31
8.4	Encendido y apagado del extractor Duo	32

9.	Uso del extractor Motif Duo	33
9.1	Guía de extracción	33
9.2	Preparación para la extracción	34
9.3	Alineación de la pezonera	35
9.4	Uso del sostén de extracción manos libres	36
9.5	Extracción de la leche	37
9.6	Después de la extracción	38
9.7	Almacenamiento de la leche materna	39
9.8	Funciones avanzadas	41
10.	Solución de problemas	43
10.1	Solución de problemas	43
10.2	Eliminación	45
10.3	Cuándo reemplazar las partes	46
11.	Garantía	48



2. Características principales

El extractor de leche eléctrico doble Motif Duo® utiliza un sistema de vacío para extraer la leche materna.

Extracción de leche en cualquier lugar

100 % portátil. Batería recargable con una duración de 2 horas y media.

Ultra ligero

Con un peso de menos de 500 g y lo suficientemente pequeño como para caber en un bolsillo, un bolso, un portavasos o un cajón.

Modos de extracción y de masaje

Con 10 niveles de extracción y 10 niveles de masaje, podrá extraer la leche materna de la manera más eficiente posible.

Funciones avanzadas

Capacidad de registrar y recordar sesiones de extracción personalizadas a través del modo de memoria y capacidad de controlar los ciclos por minuto durante el modo de extracción.

Motor silencioso

Un pequeño zumbido que no despertará al bebé.

Sistema cerrado

La protección contra reflujo mantiene la limpieza del motor y los tubos, lo que evita la contaminación.

Funcionamiento manos libres

Utilice el cordón desmontable que se incluye para colgar el extractor alrededor del cuello y así extraer la leche sin tener que usar las manos.

Pantalla LCD retroiluminada

Pantalla fácil de leer que no fatigará la vista.

3. Uso previsto (instrucciones de uso)

El extractor de leche eléctrico doble Motif Duo® está dirigido a las mujeres lactantes que desean extraer y recolectar su leche materna. El dispositivo Duo puede usarse como extractor simple o doble y está diseñado para su uso personal solamente.

Lea por completo este documento y siga las instrucciones al pie de la letra. Para prevenir lesiones personales y daños materiales, respete las advertencias y la información de seguridad que se entregan en este documento.



Advertencia: Para evitar lesiones menores, siga estas recomendaciones:

- El hecho de compartir un extractor de leche podría generar peligros para la salud y anular la garantía del fabricante.

4. Símbolos



Advertencia: Situación potencialmente peligrosa que podría provocar lesiones graves



Precaución: Situación posiblemente peligrosa que podría provocar lesiones corporales leves



Aviso: Información útil que debe conocer para usar este producto



Fabricante



Fecha de fabricación



Número de serie



Número de catálogo del fabricante



Consulte el manual de funcionamiento

IP21 Protección contra el ingreso



Parte aplicada tipo BF



Este producto no debe mezclarse con otros desechos comerciales para su eliminación



Alimentación



Cambio entre el modo de masaje y el modo de extracción



Aumento de la intensidad de vacío



Disminución de la intensidad de vacío

5. Seguridad

5.1 Prohibiciones, advertencias y precauciones



Advertencia: Para no anular la garantía, siga estas recomendaciones:

- No modifique este equipo sin la autorización del fabricante.
- No desensamble ni modifique el producto. El dispositivo no tiene partes que pueda reparar el usuario.



Advertencia: Para disminuir el riesgo de electrocución, siga estas recomendaciones:

- Desconecte de inmediato el producto después de usarlo.
- No use el dispositivo mientras se baña.
- No coloque ni almacene el producto donde pueda caerse en una bañera o un fregadero.
- No coloque ni deje caer el producto en agua ni en otro líquido.
- No intente tomar el producto si se cayó al agua. Desconéctelo de inmediato de la toma de corriente.



Advertencia: Para evitar incendios, electrocución o quemaduras graves, siga estas recomendaciones:

- No deje el producto sin supervisión si está conectado a una toma de corriente.
- Es necesario supervisar con atención el producto si se usa cerca de niños o personas con discapacidades.
- Deje el producto fuera del alcance de los niños.
- Use el producto solamente para su uso previsto tal como se describe en este manual. No use ningún accesorio que no haya recomendado el fabricante.
- Nunca opere este producto si tiene un cable o una clavija dañados, si no funciona correctamente o si se ha caído al piso o dañado, o si se ha caído al agua.
- Mantenga el cable lejos de cualquier superficie caliente.
- Nunca use el dispositivo mientras duerme o si tiene sueño.

- Nunca introduzca ningún objeto en ninguna abertura o tubo.
- No utilice el dispositivo en el exterior, donde se usen productos de aerosol (rociado), o donde se administre oxígeno.



Advertencia: Para evitar incendios, electrocución o quemaduras graves, siga estas recomendaciones (cont.):

- Revise siempre los cables del adaptador de corriente y de la batería antes de usarlos para comprobar que no estén dañados ni expuestos. Si se detectan daños, deje de usar de inmediato el adaptador de corriente o la batería y comuníquese con el servicio al cliente de Motif Medical.
- El dispositivo Duo de Motif Medical® debe colocarse de manera tal que resulte fácil operar el adaptador.



Advertencia: Para evitar riesgos para la salud y disminuir el riesgo de lesiones, siga estas recomendaciones:

- Si es madre y está infectada con hepatitis B, hepatitis C o el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), la leche materna extraída no disminuirá ni eliminará el riesgo de contagiar el virus al bebé.
- Antes de cada uso, compruebe que los componentes no tengan grietas, picaduras, rasgaduras, decoloración o deterioro. Si observa daños en el dispositivo, deje de usarlo hasta haber reemplazado las partes.
- Este producto está diseñado para que solo un usuario lo use y no debe compartirse entre usuarios.
- No conduzca mientras utiliza el extractor.
- No use nunca el dispositivo mientras está embarazada, ya que podría inducir el parto.
- Limpie y desinfecte todas las partes que vayan a entrar en contacto con el pecho y la leche materna antes de usar el dispositivo por primera vez.
- Lave todas las partes que hayan entrado en contacto con el pecho y la leche materna después de cada uso.
- No siga utilizando el extractor durante más de 2 sesiones consecutivas si no logra resultados.
- No descongele la leche materna congelada en un microondas ni en una sartén con agua hirviendo.
- Si aparecen mohos en los tubos, suspenda el uso y reemplácelos por tubos nuevos.
- Si se acumula la leche materna, es necesario limpiar los tubos antes de la próxima sesión de extracción.




Precaución: Para evitar lesiones menores, siga estas recomendaciones:

- No enrolle el cable alrededor del cuerpo del adaptador.
- Use solamente el adaptador de corriente que se incluye con el extractor de leche eléctrico.
- Utilice el extractor en posición vertical solamente.
- No acorte los tubos.
- Asegúrese de que la tensión del adaptador de corriente sea compatible con la fuente de alimentación.
- Primero conecte el adaptador de corriente al extractor de leche y luego a la toma de corriente de la pared.
- No use limpiadores ni detergentes antibacterianos o abrasivos mientras limpia el extractor de leche o las partes de este.
- Nunca coloque el motor del extractor de leche en agua ni en un esterilizador, ya que podría dañar el extractor de manera permanente.
- No intente retirar la pezonerera mientras utiliza el dispositivo. Apague el extractor de leche y rompa el sello entre el pecho y la pezonerera con el dedo, y luego retire la pezonerera.
- Si durante el proceso de extracción no se siente cómoda o siente dolor, apague la unidad, rompa el sello entre el pecho y la pezonerera con el dedo y retire la pezonerera.
- Las botellas y los componentes de plástico se vuelven frágiles al congelarse y podrían romperse si se caen al piso.
- Las botellas y los componentes podrían dañarse si se manipulan de manera incorrecta; por ejemplo, si se caen al piso, si se aprietan en exceso o si se vuelcan.
- Manipule las botellas y los componentes con cuidado.
- No use la leche materna si las botellas o los componentes sufren daños.

6. Partes

6.1 Qué se incluye

i Mientras abre la caja, asegúrese de que se incluyan los siguientes componentes.

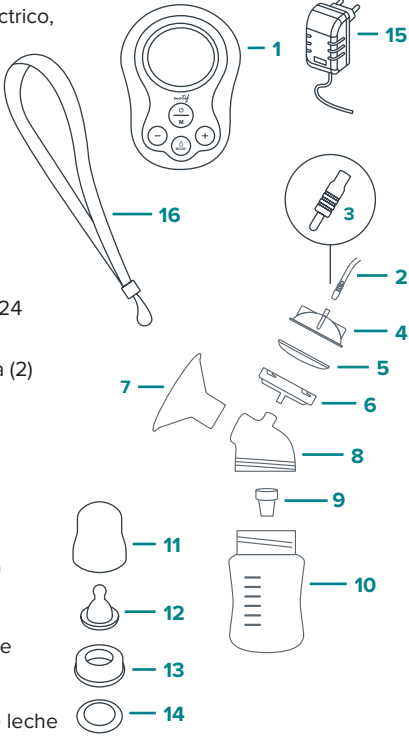- 
- 1 Extractor de leche eléctrico, Motif Medical® Duo
- 2 Tubo (2)
- 3 Conector de tubo (4)
- 4 Parte superior de diafragma
- 5 Diafragma (2)
- 6 Parte inferior de diafragma
- 7 Pezoneras de 21 mm, 24 mm y 27 mm (3 pares)
- 8 Conector de pezonera (2)
- 9 Válvula (2)
- 10 Botella de 180 ml (2)
- 11 Tapa de botella (2)
- 12 Tetina (2)
- 13 Cubierta de botella (2)
- 14 Disco de botella (2)
- 15 Adaptador de corriente
- 16 Cordón desmontable
- Kits de recolección de leche (2)

Accesorios y partes adicionales disponibles para el extractor de leche Duo:

- Kit de reposición completo con repuestos
- Partes individuales
- Sostén de extracción de leche manos libres (se incluye en algunos modelos)


 **Visite motifmedical.com/replacement-supplies/ para encontrar repuestos y suministros adicionales del dispositivo Duo.**

6.2 Botones y funciones

PANTALLA LCD




CONTROL DE BOTONES

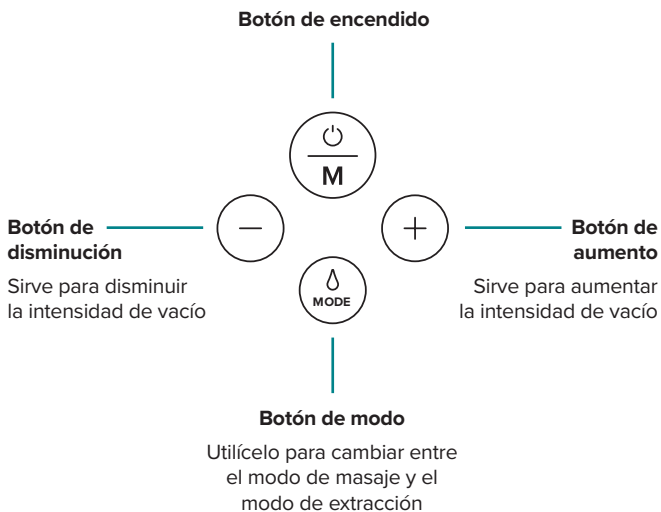

EXTRACCIÓN SIMPLE

1 Puerto básico de tubo

Puerto de tubo para realizar una extracción de leche simple

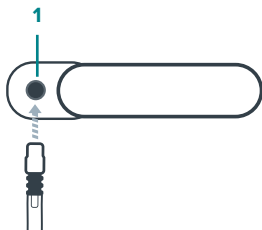


EXTRACCIÓN DOBLE

2 Puerto auxiliar de tubo

Puerto de tubo para realizar una extracción de leche doble


3 Cubierta de puerto

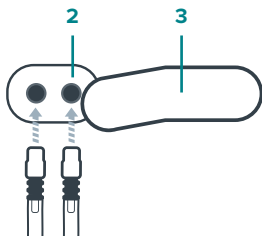

ADAPTADOR DE CORRIENTE

4 Puerto del adaptador de corriente

5 Estabilizador de la cubierta del puerto

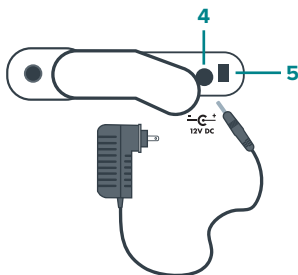

El software de Motif Duo® incluye tres funciones principales:

1. Dos modos de extracción
2. Función de frecuencia
3. Memoria programable

Cada botón tiene tres funciones:

1. Al presionar el botón, se realizará una función básica
2. Al mantenerlo presionado brevemente, se activará la función secundaria
3. Al mantenerlo presionado por más tiempo, se activará la función avanzada



Botón de encendido

Sirve para encender y apagar el extractor.

Cuando el extractor está encendido, se iniciará la secuencia almacenada en la memoria.

Cuando se active una secuencia de la memoria, parpadeará el ícono de la memoria en la pantalla LCD. Opere el extractor según sus preferencias personales, luego presione el botón para guardar la secuencia en la memoria. La secuencia de la memoria no se borrará al apagarse el dispositivo Duo.



Botón de aumento

Sirve para aumentar el nivel de velocidad y vacío durante el modo de masaje y extracción.

Con este botón se aumenta la frecuencia durante el modo de extracción.

Si se opera una secuencia guardada en la memoria, esta se detendrá; de lo contrario, no habrá ninguna respuesta.



Botón de disminución

Sirve para aumentar el nivel de velocidad y vacío durante el modo de masaje y extracción.

Con este botón se aumenta la frecuencia durante el modo de extracción.

Si se opera una secuencia guardada en la memoria, esta se detendrá; de lo contrario, no habrá ninguna respuesta.








Botón de modo

Sirve para cambiar entre el modo de masaje y de extracción.

Con este se eliminará una secuencia guardada en la memoria. El ícono de la memoria desaparecerá una vez que se haya eliminado la secuencia. Tras eliminarse una secuencia, el dispositivo Duo regresará a la configuración de extracción anterior.

Si no se ha guardado ninguna secuencia, no habrá ninguna respuesta.

A continuación, podrá ver lo que indican los símbolos de la pantalla LCD:

Nombre	Estado	Descripción
Memoria	Apagado	No se ha guardado ninguna secuencia de funcionamiento
	Parpadeo	Se está guardando la secuencia de funcionamiento
	Encendido	Hay una secuencia de funcionamiento guardada
Modo de extracción	Encendido	Funcionamiento en modo de extracción
	Parpadeo	Funcionamiento en la secuencia guardada del modo de extracción
Conexión del adaptador de corriente	Apagado	El adaptador de corriente no está conectado
	Encendido	El adaptador de corriente está conectado
Modo de masaje	Encendido	Funcionamiento en modo de masaje
	Parpadeo	Funcionamiento en la secuencia guardada del modo de masaje
Batería	Porcentaje de carga	 Completamente cargada
		 75% - 100%
		 50% - 75%
		 0% - 25%
		 0%
		Cargue la batería apenas comience a parpadear el símbolo [Lo bt]. Si se agota la batería, el dispositivo Motif Duo® se apagará de manera automática.
Temporizador	Encendido	Indica el tiempo de funcionamiento desde que se encendió el dispositivo. Después de 30 minutos, el cuerpo principal se apagará de manera automática. Cuando sea necesario cargar la batería, se mostrará el símbolo [Lo bt].
Nivel de velocidad y vacío	Encendido	Se muestra el nivel de velocidad o vacío (1-10). Se muestra el nivel de velocidad o vacío de manera gradual.

6.3 Configuración y modos



Modo de extracción

Patrón de succión con ciclos más lentos y mayor vacío que permite extraer la leche de manera suave y eficiente.



Modo de masaje





Patrón de succión con ciclos rápidos y vacío bajo que estimula la bajada y el flujo de la leche.



Es posible guardar su configuración preferida del modo de masaje y de extracción, así como la duración de las sesiones de extracción más productivas. Para saber cómo configurar los modos de memoria, consulte la Sección 9.7 Funciones avanzadas.

Función de frecuencia

Esta función está disponible durante el modo de extracción, y determina la cantidad de veces en que funciona el extractor por minuto.

- Hay 3 niveles de frecuencia (1-3) que puede seleccionar durante el modo de extracción presionando los botones de AUMENTO  o  DISMINUCIÓN durante 1 segundo.
- Aparecerá [CY: --] en la pantalla LCD para indicar el nivel de frecuencia actual.
- Ajuste el nivel de frecuencia presionando el botón de  AUMENTO o  DISMINUCIÓN
- La frecuencia se mostrará durante 4 segundos, y luego el extractor regresará de manera automática al modo de funcionamiento normal.

 **Al aumentar la frecuencia, también podría aumentar el ruido y la vibración.**

7. Esterilización y limpieza



Antes del primer uso, esterilice las siguientes partes:

- Diafragmas
- Pezoneras
- Tapas de botellas
- Válvulas
- Botellas
- Tetinas



Advertencia: No esterilice ni lave los tubos.

- Repita la esterilización de las demás partes indicadas una vez al día tras usar el extractor.

Instrucciones de esterilización

1. Si ya ha utilizado anteriormente las partes, primero siga las instrucciones de limpieza.
2. Coloque las partes del extractor de leche en una olla y cúbralas con agua.
3. Hierva el agua y deje hervir durante 5 minutos.
4. Retire las partes con unas tenazas limpias.
5. Coloque las partes del extractor sobre una toalla de papel limpia o un paño de cocina y deje que se sequen por completo con aire.



Las partes también pueden esterilizarse en un esterilizador por vapor o una bolsa esterilizadora para microondas para esterilizarlas con rapidez y eficiencia.



No coloque los tubos en las bolsas esterilizadoras para intentar limpiarlos.

Instrucciones de limpieza

1. Lávese bien las manos con agua tibia y jabón.
2. Desensamble cada una de las partes del extractor de leche que haya tenido contacto con la leche materna. Aquí se incluyen las válvulas, las botellas, las pezoneras y las tetinas. *Si aparece leche o humedad en los tubos, no los limpie, sino que reemplácelos lo antes posible. Lávelos y cuélguelos para que se sequen si los necesita volver a usar antes de reemplazarlos. Asegúrese de que los tubos estén secos antes de usarlos. La humedad presente en los tubos podría entrar al extractor y dañar el motor.
3. Enjuague cada parte con agua fría para eliminar los residuo de leche.
4. Opciones para lavar las partes del extractor:
 - Lave por separado cada parte en el fregadero con un cepillo suave y jabón (asegúrese de usar un cepillo o un paño nuevos exclusivamente para las partes del extractor de leche).
 - Remoje cada parte en agua tibia con jabón durante 5 minutos y luego enjuáguela bien.
5. Seque las partes con una toalla seca o deje que se sequen por completo con aire sobre una superficie sanitaria, como una toalla de papel limpia o un paño de cocina limpio. No seque a palmaditas.
6. Limpie la parte exterior del extractor de leche con una toalla seca y limpia. *No lave la parte exterior del extractor de leche con agua ni deje que el extractor se humedezca durante la limpieza.



No se recomienda lavar y secar las partes del extractor Motif en el lavavajillas. Los lavavajillas no tienen una temperatura estándar y algunos podrían deformar las partes. Las partes que sufran daños en el lavavajillas no están cubiertas por la garantía.

Después de cada uso

1. Lávese bien las manos antes de manipular cada componente del extractor de leche.
2. Desensamble las partes que entren en contacto con la leche materna, como la válvula, la botella, la tetina, la pezonera, el disco de la botella y la cubierta de la botella.
3. Enjuague cada parte con agua fría para eliminar los residuos de leche.
4. Opciones para lavar las partes individuales:
 - Lave por separado cada parte con un cepillo suave o un paño de cocina limpio.
 - Remoje cada parte en agua tibia con jabón durante 5 minutos y luego enjuáguela bien.
5. Seque las partes con una toalla limpia y/o deje que se sequen por completo con aire sobre una superficie sanitaria.
6. Limpie el cuerpo principal con una toalla limpia y seca después de cada uso. * Nunca use agua para lavar la parte exterior del extractor de leche.
7. Una vez que se hayan secado por completo, almacene las partes en una bolsa o un contenedor limpios. * No almacene las partes que estén húmedas.

8. Funcionamiento del extractor de leche

8.1 Tamaño de la pezonera

IMPORTANCIA DEL TAMAÑO

El proceso de extracción no debe doler. Esta guía es un punto de partida que le ayudará a determinar el tamaño óptimo de la pezonera según el diámetro del pezón.

Cómo encontrar la pezonera del tamaño correcto


Paso 1

Con una regla o una cinta de medir, mida el diámetro del pezón desde la base (por el medio) en milímetros (mm).

Paso 2

Agregue 4 mm para determinar el tamaño de la pezonera.

Ejemplo: Si el pezón es de 26 mm de diámetro, el tamaño recomendado de la pezonera es 30 mm.

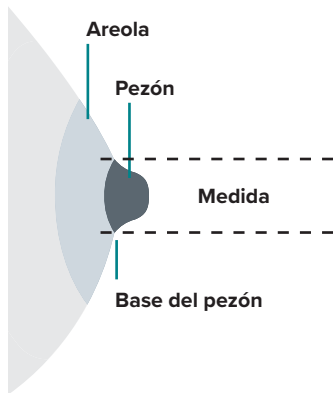


No incluya la areola.

*1 cm = 10 mm

Vea a continuación el tamaño recomendado de la pezonera según sus medidas:




VERIFICACIÓN DEL TAMAÑO DE LA PEZONERA

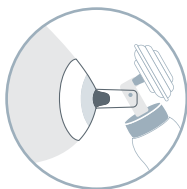


Demasiado pequeña

Durante la extracción de leche, una parte o la totalidad del pezón roza los costados del túnel de la pezonera.

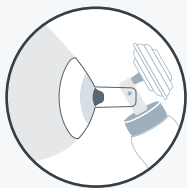

Ajuste correcto

Durante la extracción de leche, el pezón puede moverse libremente en el túnel de la pezonera. Hay espacio alrededor del pezón y una pequeña parte de la areola se introduce en el túnel con el pezón.

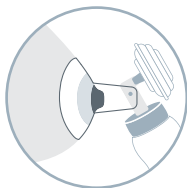

Demasiado grande

Durante la extracción de leche, la mayoría de la areola se introduce en el túnel de la pezonera con el pezón. Es posible sentir que la areola roza el costado del túnel de la pezonera.

¿Debo probar una pezonera de otro tamaño?


- ¿El pezón roza los costados del túnel al punto de causarle molestia?
- ¿La areola se introduce demasiado en el túnel?
- ¿Aparece enrojecimiento?
- ¿El pezón o la areola se ponen de color blanco?
- ¿Siente que le queda leche tras usar el extractor?

Si respondió “Sí” a cualquiera de estas preguntas, debería probar un nuevo tamaño de acuerdo a las instrucciones de medición anteriores.


Si aun así no sabe si seleccionó el tamaño correcto, consulte con un asesor en lactancia o un especialista en amamantamiento para que le ayude a elegir la pezonera del tamaño correcto.

8.2 Ensamble del extractor Duo

1. Lávese las manos antes de tocar los componentes del extractor.
2. Coloque el diafragma sobre la parte interior del diafragma, de manera que la superficie con la línea transversal quede orientada hacia la parte inferior del diafragma. Cúbrala con la parte superior del diafragma y gírela para cerrarla.
3. Coloque el cordón en el extractor de leche utilizando el anillo ubicado en la parte inferior del cuerpo principal del extractor. Introduzca la correa del cordón por el anillo. Tire de la correa hasta que esté ajustada.

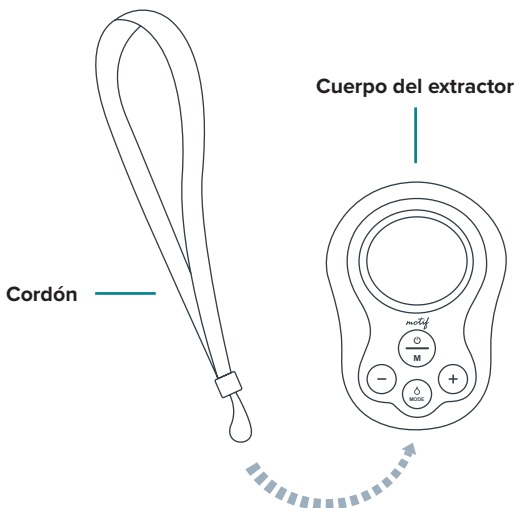


4. Coloque la pezonera en el conector de la pezonera.
5. Conecte la válvula colocándola en la parte inferior del conector de la pezonera. Atornille la botella al conector de la pezonera.
6. Gire el diafragma sobre la parte superior del conector de la pezonera.
7. Conecte los tubos al puerto del cuerpo principal del extractor.
8. Conecte el otro extremo de los tubos a la parte posterior del diafragma introduciendo la punta de la parte superior del diafragma en los tubos.
9. Para limpiarla o almacenarla tras su uso, desatornille la botella del conector de la pezonera y de la cubierta. Retire los tubos del diafragma y del extractor de leche. Gire el diafragma para retirarlo del conector de la pezonera. Retire la pezonera del conector de la pezonera. Siga las instrucciones de limpieza de las partes del extractor de leche después de cada uso.

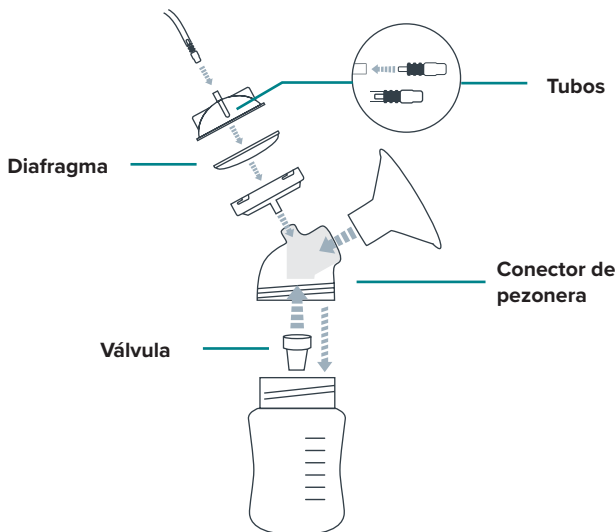


8.3 Cómo usar el extractor doble

Para usar el dispositivo Duo en el modo de extracción doble, retire el tapón del puerto de flujo de aire y conecte el tubo del kit de recolección adicional.

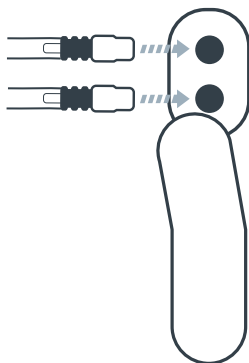

Al regresar al modo de extracción simple, asegúrese de cubrir el puerto de flujo de aire con el tapón.

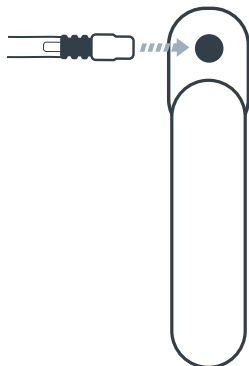

8.4 Encendido y apagado del extractor Duo



Presione el botón de ENCENDIDO

El dispositivo se encenderá, por lo que se iluminará la pantalla. El dispositivo Duo comenzará en el modo de masaje para estimular la bajada de la leche.



Presione el botón de MODO

Con esto el extractor cambiará al modo de extracción una vez que comience a fluir la leche.



Ajuste la succión al nivel de comodidad preferido



Use el extractor de leche con la batería completamente cargada si es posible

Antes del primer uso, conecte el dispositivo al adaptador de corriente y deje que el extractor de leche se cargue por completo.

El nivel de carga de la batería que se muestre en la pantalla LCD podría diferir de la capacidad real de la batería.

Cargue de inmediato la batería cuando aparezca el símbolo [Lo Bt] en la pantalla LCD. Si el extractor de leche no se usa durante un largo período de tiempo, asegúrese de que la batería esté completamente cargada antes de usarlo. Desconecte el adaptador de corriente del extractor de leche inmediatamente después de haber terminado de cargar el dispositivo.

9. Uso del extractor Motif Duo

9.1 Guía de extracción

 **Incluso si utiliza el extractor de leche, se recomienda amamantar al bebé cuando sea posible.**

- Masajee suavemente sus pechos o aplique compresas tibias desde el pecho hasta el pezón antes de comenzar la sesión de extracción.
- Extraiga leche de cada pecho durante 10 a 15 minutos. Se recomienda extraer la leche con frecuencia y no durante mucho tiempo (cada 2 a 3 horas, 8 veces al día).

9.2 Preparación para la extracción

1. Compruebe que está utilizando la pezonera del tamaño correcto. Consulte la sección 8.1: Tamaño de la pezonera para obtener más detalles.
2. Lávese bien las manos.
3. Conecte el kit de recolección ensamblado al puerto del tubo del extractor de leche.
4. Asegúrese de que el kit de recolección esté conectado y colocado de manera correcta.
5. Coloque la pezonera en el pecho, de manera que el pezón esté centrado correctamente en el túnel.
6. Sostenga la pezonera y el conector en el pecho con el dedo pulgar y el dedo índice.
7. Sostenga su pecho con la palma de la mano.


9.3 Alineación de la pezonera

Centre la pezonera en su pecho, de manera que el pezón se introduzca en el túnel de la pezonera.

Es importante colocar de manera correcta la pezonera antes de comenzar a extraer la leche, para así no sentir dolor si el pezón se tuerce o roza con el costado de la pezonera. Si va a realizar una extracción doble, coloque la segunda pezonera.


Si le preocupa el ajuste o quiere asegurarse de haber colocado correctamente la pezonera, consulte la subsección “Verificación del tamaño de la pezonera” de la sección 8.1: Tamaño de la pezonera.

Aunque podría sentir un poco de incomodidad la primera vez que utilice un extractor de leche, no debería doler. Si no está segura del tamaño de la pezonera, comuníquese con un profesional médico o un representante de Motif Medical que pueda ayudarle a obtener el ajuste correcto.

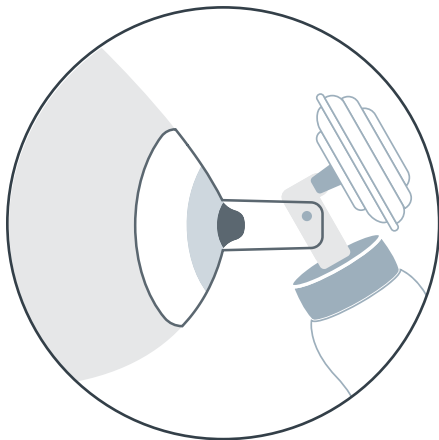





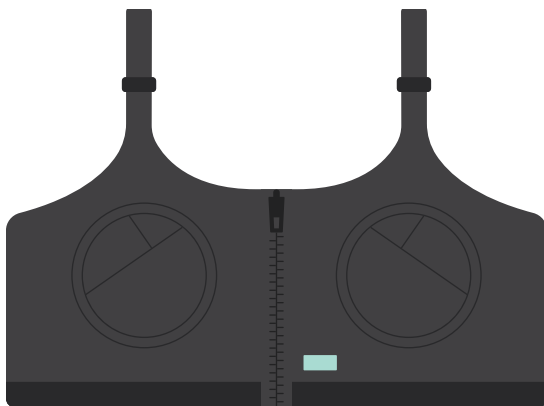



9.4 Uso del sostén de extracción manos libres

1. Encuentre su ajuste: Ajuste las correas, pero no demasiado, de manera que los círculos delanteros estén centrados con el pezón. Use el panel posterior de velcro para ajustar el tamaño de la banda alrededor del pecho.
2. Use las capas sobrepuestas de género dentro de los dos círculos delanteros para lograr un sello hermético entre las pezoneras y el pezón.
3. Utilice la cremallera delantera para ponerse o quitarse el sostén sin cambiar el ajuste.




i Si necesita ayuda adicional con el tamaño, comuníquese con el departamento de servicio al cliente de Motif Medical®. Podrá hacerlo a través del chat en [motifmedical.com](https://www.motifmedical.com), por correo electrónico a hello@motifmedical.com o por teléfono al (844) 272-8390.

9.5 Extracción de la leche

1. Presione el botón de ENCENDIDO  para comenzar la extracción. El extractor de leche comenzará con la última configuración utilizada, así que tal vez deba presionar el botón de MODO  para volver al modo de masaje.
2. Ajuste el nivel de vacío presionando el botón de AUMENTO  y  el botón de DISMINUCIÓN para obtener una configuración cómoda. Durante el modo de masaje, la configuración es de 60 ciclos por minuto.
3. Una vez que comience a fluir la leche, presione  el botón de MODO para cambiar al modo de extracción.
4. Tal vez sea necesario ajustar el vacío y los ciclos por minuto presionando el botón de AUMENTO  y  DISMINUCIÓN para obtener la configuración de extracción óptima.
5. Al finalizar la sesión de extracción, presione el botón de ENCENDIDO  del extractor de leche para apagarlo. Tenga en cuenta que el extractor de leche se apagará de manera automática tras 30 minutos.

9.6 Después de la extracción

Después de cada sesión de extracción, asegúrese de guardar el producto. Nunca intente limpiar ni esterilizar las partes del extractor si se encuentra ensamblado; limpie y esterilice cada parte de manera individual.

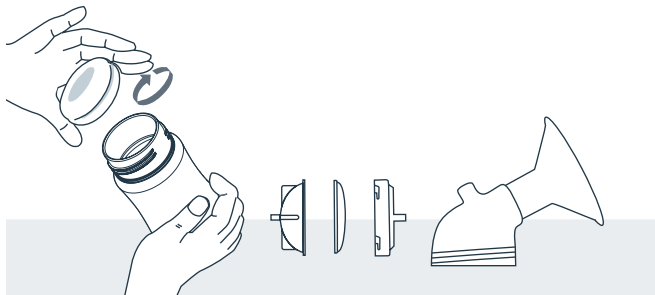

1. Gire el diafragma para retirarlo de la pezonera.
2. Retire la pezonera de la botella recolectora de leche y cierre bien la botella con la cubierta y el disco, y almacénela de manera segura.
3. Retire los tubos del diafragma y del extractor de leche.
4. Asegúrese de que los tubos no estén expuestos a la humedad y de que esta no ingrese a los mismos. Almacene los tubos en una bolsa o un recipiente limpios. No enrolle los tubos alrededor del extractor de leche.

9.7 Almacenamiento de la leche materna

- i** Al almacenar la leche materna en una bolsa, asegúrese de escribir en esta con rotuladores no tóxicos.

		Lugar de almacenamiento/Temperatura		
		Temperatura ambiente 77°F (25°C) o menos	Refrigerador 40°F (4°C)	Congelador 0°F (-18°C) o menos
Tipo de leche materna	Extraída recientemente	0-4 horas	0-4 días	0-6 meses es lo ideal 6-12 meses es aceptable
	Descongelada	1-2 horas	0-24 horas (1 día)	*Nunca vuelva a congelar la leche materna tras haberse descongelado
	Restos (el bebé no terminó la botella)	0-2 horas después de que el bebé haya terminado de beber		


Fuente: CDC.gov

Cómo descongelar la leche materna


1. Revise siempre la fecha que aparece en el envase de leche antes de usarlo. No use leche sin fecha ni leche que se haya almacenado más tiempo del recomendado.
2. Descongele la leche en el refrigerador o con un chorro de agua fría.
3. Caliente la leche con un chorro de agua tibia y mueva suavemente el envase para mezclar la leche. No agite la botella.
4. Si no dispone de agua tibia, caliente una olla con agua en la estufa. Una vez que el agua esté tibia (no debe hervir), retire la olla de la estufa y coloque el envase de leche en la olla. Nunca caliente el envase de leche directamente sobre la estufa.
5. Nunca caliente la leche materna en un microondas, ya que podría provocar puntos calientes peligrosos que podrían quemarla a usted o al bebé.
6. Compruebe siempre la temperatura de la leche con la parte interna de la muñeca antes de alimentar al bebé. La leche debe sentirse tibia, no caliente.
7. Tras descongelarla, la leche debe almacenarse en el refrigerador durante 24 horas como máximo.
8. Nunca vuelva a congelar la leche descongelada. Deseche la leche previamente congelada que no se utilice en 24 horas.


9.8 Funciones avanzadas

Configuración del modo de memoria


Presione  el botón de ENCENDIDO durante 2 segundos para activar la función de memoria. El ícono de memoria comenzará a parpadear, y el extractor comenzará a registrar la sesión de extracción.


Ajuste la configuración durante la sesión de extracción de leche de la manera que más le convenga

Vuelva a presionar  el botón de ENCENDIDO durante 2 segundos para dejar de registrar la sesión. El ícono de memoria en la pantalla indicará que se ha almacenado el programa.

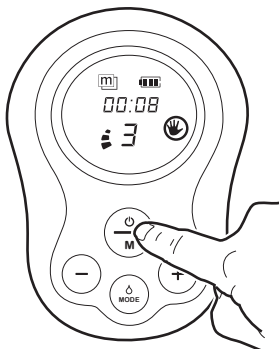


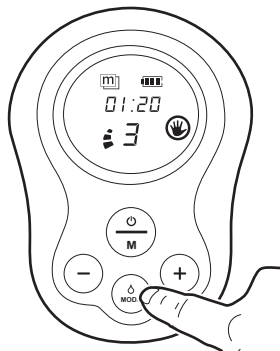
Inicio del modo de memoria

Para reproducir el programa de extracción, presione  el botón de DISMINUCIÓN (el mismo botón que sirve para disminuir la intensidad de vacío) durante 2 segundos.

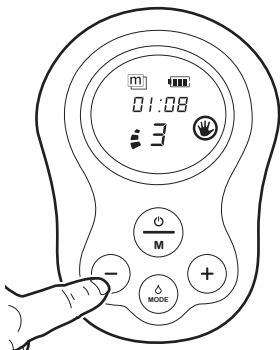

Eliminación del modo de memoria configurado

Presione  el botón de MODO durante 2 segundos para eliminar el programa de extracción guardado. Tras eliminarlo, el ícono de memoria desaparecerá de la pantalla.




10. Solución de problemas

10.1 Solución de problemas

Problema	Verificación	Solución
La succión es baja o nula	<p>Desensamble la pezonera, los kits de recolección de leche, el diafragma y la botella.</p> <p>Compruebe que las partes no tengan grietas ni picaduras.</p> <p>Asegúrese de que los tubos no tengan torceduras ni acodamientos.</p> <p>Revise las conexiones entre:</p> <ul style="list-style-type: none">• El diafragma y el conector de la pezonera;• Los tubos y el kit de recolección de leche;• Los tubos y el cuerpo principal.	<p>Limpe y seque cada parte. Una vez que cada componente esté completamente seco, vuelva a ensamblar las partes.</p> <p>Mientras realiza una extracción simple, asegúrese de que el puerto auxiliar esté tapado con la cubierta.</p>
La batería no carga	<p>Asegúrese de que el adaptador de corriente esté conectado correctamente.</p>	<p>Si el extractor no se carga, reemplace el adaptador de corriente.</p>
El dispositivo no se enciende	<p>Verifique que no haya objetos extraños en el botón de encendido y en el exterior del extractor.</p>	<p>Si hay daños, comuníquese con el servicio al cliente de Motif al 844-272-8390 o con el lugar donde compró el extractor.</p>

Verificación	Solución
El cuerpo principal se humedece	<p>Desconecte el adaptador de corriente de la toma de corriente.</p> <p>Apague el extractor de leche.</p> <p>Limpie el cuerpo principal con un paño seco y limpio y almacénelo en un lugar seco y cálido durante 12 horas aproximadamente.</p>
Hay leche materna en los tubos	<p>Apague el extractor de leche.</p> <p>Desconecte los tubos del diafragma.</p> <p>Retire la leche y los tubos del diafragma.</p>

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i Si necesita ayuda adicional para solucionar problemas con el extractor de leche, comuníquese con el departamento de servicio al cliente de Motif Medical®. Podrá hacerlo a través del chat en motifmedical.com, por correo electrónico a hello@motifmedical.com o por teléfono al (844) 272-8390.




10.2 Eliminación

Envíe los componentes que ya no use a Motif Medical® o elimine el dispositivo de manera correcta de acuerdo con las normativas locales, estatales y federales.



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Al igual que con los equipos eléctricos y electrónicos, el dispositivo debe eliminarse de acuerdo a un procedimiento especializado de recolección, retiro y reciclaje o destrucción según la Directiva 2012/19/EU del Consejo Europeo sobre Desechos de Equipos Eléctricos y Electrónicos (WEEE).



10.3 Cuándo reemplazar las partes

La frecuencia con la que debe reemplazar los suministros del extractor de leche varía según la frecuencia con la que utiliza el dispositivo. Por ejemplo, una madre que extrae leche unas 9 veces al día y desinfecta el extractor con mayor frecuencia que una madre que solamente extrae leche 3 a 4 veces al día deberá reemplazar las partes con mayor frecuencia.

 **Una buena referencia es reemplazar las partes cada 90 días.**

Reemplazo de los tubos del extractor de leche

A medida que los tubos se estiran y se desgastan con el tiempo, podría verse afectada la intensidad de succión del extractor de leche.

- Si los tubos se deslizan con facilidad por el motor y el protector de reflujo, es hora de reemplazarlos.
- Si hay humedad en los tubos, también debe reemplazarlos de inmediato.
- No hay manera de esterilizar por completo los tubos para evitar que se acumulen bacterias al interior, y la humedad podría dañar el motor del extractor de leche.

Reemplazo de las válvulas

Las válvulas de silicona (las membranas o pequeñas solapas blancas de las válvulas) deben reemplazarse entre 1 a 3 meses según la frecuencia de uso, ya que podrían afectar la potencia de succión.

- Las membranas deben reemplazarse cuando no queden planas sobre las válvulas.
- Es importante recordar que las partes más pequeñas del extractor de leche podrían no presentar daños visibles.

Reemplazo de los protectores de reflujo

Las membranas que hay al interior de los protectores de reflujo podrían estirarse y perder la elasticidad con el tiempo, por lo que perderían eficacia a la hora de impedir el ingreso de humedad en el motor del extractor de leche.

- Deben reemplazarse entre 3 a 6 meses, en función del uso.
- Si ve rasgaduras, deformación, cortes o decoloración, es hora de reemplazarlas.

Reemplazo de las pezoneras (copas)

Las pezoneras acumularán residuos, pueden agrietarse o decolorarse con el tiempo según la frecuencia de uso del extractor.

- Deben reemplazarse cada 6 meses.
- Sin embargo, si detecta grietas, rasgaduras o deformación, tal vez sea necesario reemplazarlos antes.
- La decoloración no afecta el funcionamiento del extractor, pero tal vez no sea visualmente atractiva.



Precaución: Para evitar lesiones menores, siga estas recomendaciones:

- Compruebe que el conjunto de consumibles no esté dañado ni desgastado antes del uso y reemplácelo si es necesario. Respecto a la tetina, revísela antes de cada uso y tire de ella en todas las direcciones. Deséchela si detecta indicios de daños o debilidad.
- Para mantener un rendimiento óptimo, se recomienda reemplazar los consumibles de manera periódica. El período de uso recomendable de los consumibles, sin incluir la batería, es de 1 a 3 meses, pero podría variar según el entorno de uso.
- No exponga la tetina a la luz solar directa, al calor ni a un desinfectante (“solución esterilizadora”) por más tiempo del recomendado, ya que podría debilitar la parte.

11. Garantía

Tras recibir el extractor, regístrelo en motifmedical.com/product-registration

Todos los productos de Motif Medical® que se adquieran a través de distribuidores autorizados incluyen una garantía del fabricante que estipula que el producto no tendrá defectos de mano de obra ni de materiales; esta garantía es de 2 años en el caso de los extractores de leche eléctricos dobles, de 1 año en el caso de las baterías internas, y de 90 días en el caso de las partes del extractor de leche y el extractor de leche manual.

La única obligación de Motif conforme a esta garantía expresa será, a criterio de Motif, reemplazar o reparar el producto o las partes del mismo (en caso de que el producto no esté disponible, entregar un producto similar).

La garantía comienza en la fecha de compra efectiva y se trata de una garantía sencilla que terminará de acuerdo a esta fecha de entrada en vigencia. La garantía no se ampliará si el producto es reemplazado. La garantía no es transferible. Los extractores de leche de Motif están destinados a un solo usuario, y la garantía solo se aplica al usuario original del extractor.

La garantía cubre los defectos de fabricación. Motif Medical® no puede reemplazar una parte del extractor que fue dañada por el usuario final mientras usaba el producto. La garantía no cubre los elementos extraviados o robados, el desgaste normal de las partes del extractor de leche ni los elementos que se usen o almacenen de manera incorrecta. El incumplimiento de las instrucciones de funcionamiento o las alteraciones que se realicen en el producto anularán la garantía.

Los productos cubiertos bajo garantía se envían por correo terrestre estándar. Se encuentra disponible un envío con entrega urgente, en 24 horas o en 2 días por una tarifa adicional. La garantía solamente es válida en Estados Unidos. Los elementos cubiertos bajo garantía solamente se enviarán a direcciones ubicadas en EE. UU.



Si tiene una pregunta sobre la garantía, llámenos al 844-272-8390, visite nuestra página web motifmedical.com o envíe un correo electrónico a nuestro servicio al cliente a hello@motifmedical.com



Fabricado para:

Motif Medical®, LLC
8 The Green, Suite 5601
Dover, DE 19901

Teléfono: (844) 272-8390

Correo electrónico:
info@motifmedical.com

Sitio web: www.motifmedical.com



Gracias por elegir el extractor de leche eléctrico doble Motif Duo®

(844) 272-8390
info@MotifMedical.com
www.motifmedical.com

Motif Medical®
8 The Green, Suite 5601
Dover, DE 19901