

# Краткое руководство Motif Aura

## 1. Кнопки и функции


- A** Уменьшение уровня вакуума (всасывания)
- B** Кнопка питания
- C** Увеличение уровня вакуума (всасывания)
- D** Индикатор беспроводного соединения
- E** Заряд батареи
- F** Дисплей таймера/уровня



## 2. Сборка молокоотсоса Motif Aura

### Сборка молокоотсоса

1. Вымойте руки, прежде чем прикасаться к компонентам молокоотсоса.
2. Для зарядки используйте кабель USB-C.
  - Можно использовать со стандартным зарядным устройством для телефона на 5В.
  - Порт подключения находится на передней стороне молокоотсоса.
3. Соедините воронку и диафрагму.
4. Прикрепите бутылочку после соединения клапана и воронки.
5. Прикрепите воронку к основному блоку.
  - Используйте силиконовые вставки для подбора более удобного и подходящего размера.

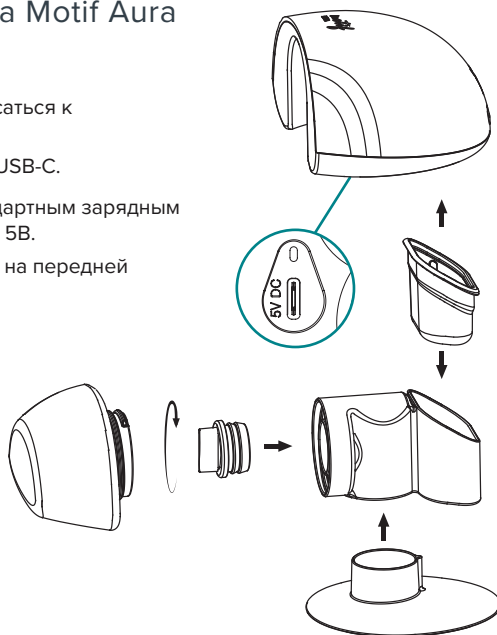

### 3. Сцеживание молока

1. Нажмите кнопку ПИТАНИЯ, чтобы начать сцеживание.
  - После первого использования Motif Aura автоматически запомнит ваши последние настройки для следующего сцеживания.
2. Отрегулируйте уровень и режим всасывания (вакуума), нажимая кнопку УВЕЛИЧИТЬ и УМЕНЬШИТЬ, чтобы найти удобную настройку.
  - Режим стимуляции: уровни 1~5
  - Режим сцеживания: уровни 6~12
3. По завершении сцеживания нажмите кнопку ПИТАНИЯ, чтобы выключить и снять молокоотсос с груди.
  - После 30 минут использования он автоматически отключается в целях безопасности.

### 4. Как использовать приложение Motif Medical

1. Найдите и установите на смартфон приложение Motif Medical, доступное в [Play Store] или [App Store].
  - Приложение совместимо со следующими версиями: iOS 11 и Android 5.0 или выше.
  - Состояние подключения Bluetooth® может зависеть от смартфона или планшета, к которому подключено устройство.
2. После установки приложения Motif Medical на телефон (подключите молокоотсос через Bluetooth®.)
3. (После включения Bluetooth® на смартфоне включите молокоотсос и откройте приложение.)
4. Выберите молокоотсос Motif Aura из списка устройств.
5. При подключении двух устройств следуйте инструкциям приложения и выберите второе устройство в списке.
6. После выбора устройств(-а) нажмите “Завершить”, чтобы начать использовать приложение.

### 5. Предупреждения и меры предосторожности



**МОЛОКАВНИМАНИЕ: ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНАЯ СИТУАЦИЯ, КОТОРАЯ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНОЙ ТРАВМЕ.**



**ВНИМАНИЕ: ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНАЯ СИТУАЦИЯ, КОТОРАЯ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ЛЕГКИМ ТЕЛЕСНЫМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ.**



Изготовлено для:  
**Motif Medical®, LLC**  
**8 The Green, Suite 5601**  
**Dover, DE 19901**

Тел.: (844) 272-8390  
Эл. почта: [info@motifmedical.com](mailto:info@motifmedical.com)  
Вебсайт: [www.motifmedical.com](http://www.motifmedical.com)

*motif*  
MEDICAL