


Короткий посібник Motif Aura

1. Кнопки та функції

- A** Зменшення рівня вакууму (всмоктування)
- B** Кнопка живлення
- C** Збільшення рівня вакууму (всмоктування)
- D** Індикатор бездротового з'єднання
- E** Заряд батареї
- F** Дисплей таймера/рівня

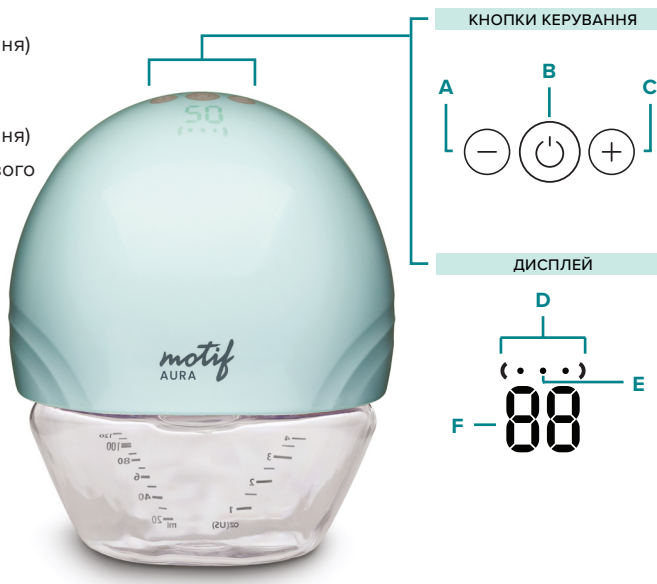

2. Збірка молоковідсмоктувача Motif Aura

AuraЗбірка молоковідсмоктувача

1. Вимийте руки, перш ніж торкатися компонентів молоковідсмоктувача.
2. Для заряджання використовуйте кабель USB-C.
 - Можна використовувати зі стандартним зарядним пристроєм для телефону 5V.
 - Порт підключення знаходиться на передній стороні молоковідсмоктувача.
3. З'єднайте насадку та діафрагму.
4. Прикріпіть пляшечку після з'єднання клапана та насадки.
5. Прикріпіть насадку до основного блоку.
 - Використовуйте силіконові вставки для підбору більш зручного та відповідного розміру.



3. Зціджування молока

1. Натисніть кнопку ЖИВЛЕННЯ, щоб розпочати зціджування.
 - Після першого використання Motif Aura автоматично запам'ятає останні налаштування для наступного зціджування.
2. Відрегулюйте рівень і режим всмоктування (вакууму), натискаючи кнопку ЗБІЛЬШИТИ та ЗМЕНШИТИ, щоб знайти зручне налаштування.
 - Режим стимуляції: рівні 1~5
 - Режим зціджування: рівні 6~12
3. Після завершення зціджування натисніть кнопку ЖИВЛЕННЯ, щоб вимкнути та зняти молоковідсмоктувач з грудей.
 - Після 30 хвилин використання Motif Aura автоматично вимикається з метою безпеки.

4. Як використовувати додаток Motif Medical

1. Знайдіть і встановіть на смартфон додаток Motif Medical, доступний у [Play Store] або [App Store].
 - Додаток сумісний з наступними версіями: iOS 11 та Android 5.0 або вище.
 - Стан з'єднання Bluetooth® може залежати від смартфона або планшета, до якого підключено пристрій.
2. Після встановлення додатку Motif Medical на телефон підключіть молоковідсмоктувач через Bluetooth®.
3. Після увімкнення Bluetooth® на смартфоні увімкніть молоковідсмоктувач і відкрийте додаток.
4. Виберіть молоковідсмоктувач Motif Aura зі списку пристроїв.
5. При підключенні двох пристроїв дотримуйтесь інструкцій програми та виберіть другий пристрій у списку.
6. Після вибору пристроїв натисніть "Завершити", щоб розпочати використання програми.

5. передження та запобіжні заходи



МОЛОКАУВАГА: ПОТЕНЦІЙНО НЕБЕЗПЕЧНА СИТУАЦІЯ, ЯКА МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО СЕРЙОЗНОЇ ТРАВМИ.



УВАГА: ПОТЕНЦІЙНО НЕБЕЗПЕЧНА СИТУАЦІЯ, ЯКА МОЖЕ СПРИЧИНИТИ ЛЕГКІ ТІЛЕСНІ УШКОДЖЕННЯ.



Виготовлено для:
Motif Medical®, LLC
8 The Green, Suite 5601
Dover, DE 19901

Тел.: (844) 272-8390
Ел. пошта: info@motifmedical.com
Вебсайт: www.motifmedical.com

motif
MEDICAL