

Motif BiliTouch™ Короткий посібник

1. Попередження та запобіжні заходи



Попередження: Щоб уникнути ризику для здоров'я та знизити ризик травм

- Захист очей: Не дивіться прямо на світлодіод. Під час застосування завжди використовуйте захисні окуляри, щоб захистити очі дитини.
- Періодично звіряйтеся з лікарняними правилами або протоколом лікування та слідкуйте за тим, щоб очі дитини були захищені від забруднення.
- Пацієнти, які знаходяться поруч із джерелом світла, повинні використовувати захисні накладки або засоби захисту очей.
- Ми рекомендуємо не сповивати дитину під час лікування, щоб знизити ризик перегріву. Якщо пристрій подасть попереджувальний сигнал, припиніть терапію і дайте світловій панелі охолонути протягом 20 хвилин, перш ніж відновити лікування.






Увага: Може призвести до незначних травм або пошкодження продукту/ майна

- Використовуйте лише аксесуари Motif Medical®.
- Перед використанням перевірте захист очей та покривало на предмет зношування або пошкоджень та за потреби замініть їх. Не використовуйте їх за наявності ознак пошкодження або дефектів.
- Захист очей та покривало одноразові, багаторазове використання заборонено.
- Для підтримки оптимальної продуктивності рекомендується періодично замінювати витратні матеріали.

2. Деталі, кнопки та функції


Блок керування

1. РК-дисплей
2. Кнопки керування
3. Пульт керування
4. Роз'єм адаптера живлення
5. Гніздо для підключення панелі
6. Живлення
7. Кнопка керування інтенсивністю світла
8. Кнопка збільшення на 30 хвилин
9. Кнопка зменшення на 30 хвилин

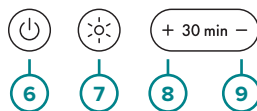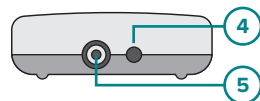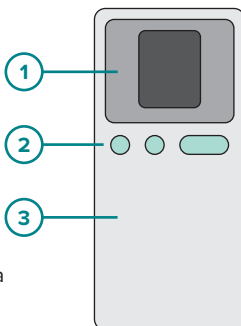


РК-екран

10. Температурне попередження
11. Індикатор заряджання
12. Стан батареї та попередження про низький заряд
13. Час роботи
14. Час, що залишився
15. Інтенсивність світла

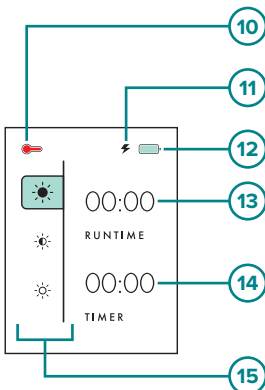

Light Pad


16. Світлова панель
17. Датчик температури
18. Освітлена область

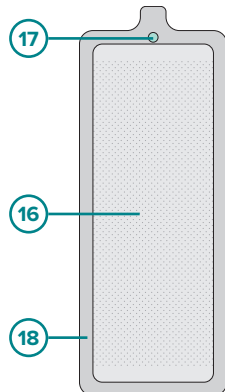

3. Підготовка пристрою та пацієнта


Перед використанням

1. Переконайтеся, що символи стрілок на роз'ємі панелі та блоці керування суміщені, а потім з'єднайте їх. Щоб вимкнути, потягніть металевий комір у бік світлової панелі, щоб від'єднати її.
2. Покладіть світлову панель на одноразове покривало. Область без малюнка повинна лягати на білу сторону світлової панелі. Якщо скласти світлову панель, як показано на малюнку, і вставити її, буде простіше. Якщо покривало забрудниться під час використання, викиньте його та використовуйте нове. Якщо на світловій панелі є будь-які сторонні речовини, перед використанням її необхідно промити відповідно до "Розділу 6: Догляд та очищення".
3. Покладіть захисні окуляри на очі пацієнта.

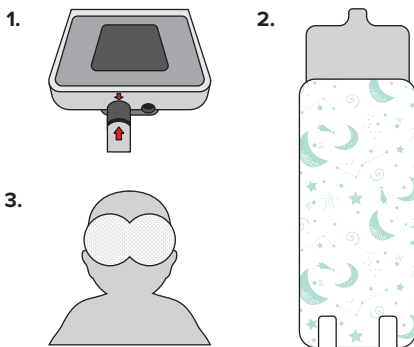


Розміщення пацієнта

1. Як показано на малюнку, помістіть пацієнта на світлову панель (з надітим покривалом), світловипромінююча область повинна бути звернена вгору. Переконайтеся, що спина пацієнта знаходиться у центрі світлової панелі.
2. Склавши світлову панель навпіл, зафіксуйте її липучкою. Шнур живлення має бути звернений до підлоги.

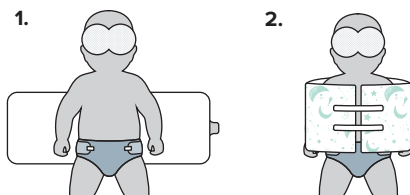


4. Використання пристрою


Використання пристрою у звичайному режимі

Кнопка  використовується, щоб встановити рівень інтенсивності, тоді пристрій працюватиме безперервно.

Звичайний режим

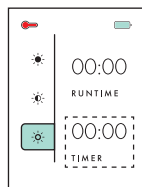


Використання пристрою в режимі таймера

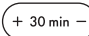Кнопка  використовується для встановлення бажаного часу таймера з інтервалами в 30 хвилин.

Режим таймера



Таймер можна встановити максимум на 24 години.

Встановіть "Високу" або "Низьку" інтенсивність світла за допомогою  кнопки.

