

Motif Luna® Краткое руководство


1. Кнопки и функции

ЖК-экран

- A** Режим стимуляции
- B** Режим сцеживания
- C** Циклы
- D** Уровень всасывания
- E** Таймер
- F** Заряд батареи

Кнопки управления


- G** Кнопка режима
- H** Кнопка увел./умен. циклов
- I** Светодиодный ночник
- J** Кнопка увел./умен. уровней
- K** Кнопка питания

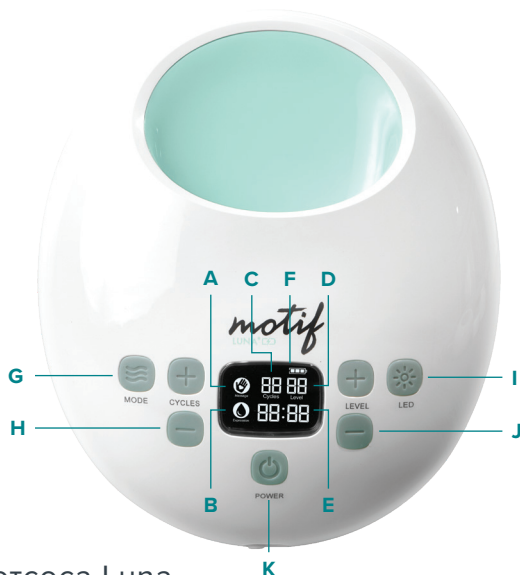

2. Подготовка молокоотсоса Luna


Сборка молокоотсоса Luna

1. Вымойте руки, прежде чем прикасаться к компонентам молокоотсоса.
2. Вставьте диафрагму в нижнюю часть диафрагмы (компонент, который соединяется с воронкой). Убедитесь, что она надежно закреплена и край диафрагмы прилегает к ободу нижней части диафрагмы.
3. Присоедините верхнюю часть диафрагмы (компонент, который соединяется с трубкой) к нижней части диафрагмы и самой диафрагме, защелкнув нижнюю часть диафрагмы на ободу верхней диафрагмы.
4. Вставьте клапан в нижнюю часть воронки.
5. Присоедините собранную диафрагму к верхней части воронки. Скручивайте ее, чтобы прикрепить, а затем снять, не повредив ее.
6. Прикрутите бутылочку к нижней части воронки.
7. Подсоедините трубку к собранной диафрагме и подсоедините другой конец трубки к насосу. (Для одиночного сцеживания закройте одно из отверстий для подачи воздуха заглушкой).
8. Подсоедините адаптер питания к насосу.
9. Вставьте адаптер питания в электрическую розетку.

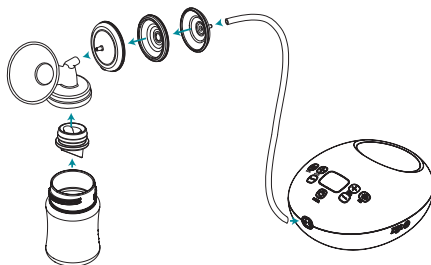


3. Использование молокоотсоса Luna

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДВОЙНОЙ МОЛОКООТСОС

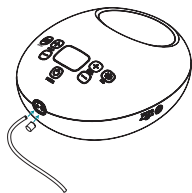

Одиночный насос

При возврате в режим одиночного насоса обязательно закройте отверстие для подачи воздуха заглушкой.

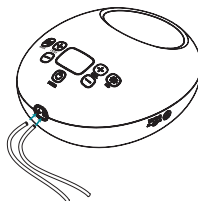

Двойной насос

Чтобы использовать Luna в режиме двойного насоса, снимите заглушку с отверстия для подачи воздуха и подсоедините трубку из дополнительного комплекта для сбора молока.

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ НАСОСА LUNA

1. **Нажмите кнопку питания.** Устройство включится, о чем свидетельствует загорание экрана. Luna перейдет в режим стимуляции, чтобы ускорить сцеживание.
2. **Нажмите кнопку переключения режима,** чтобы перейти в режим сцеживания, как только молоко начнет течь. Режим стимуляции также имеет функцию, при которой он автоматически завершается и переключается в режим сцеживания без необходимости нажимать кнопку для изменения режимов вручную.
3. **Отрегулируйте всасывание до желаемого уровня комфорта.**
4. **Если вы хотите прекратить сцеживание,** сначала нажмите кнопку питания, затем снимите с груди насадку и комплект для сбора молока.

ЗАРЯД БАТАРЕИ ИЗГОТОВЛЕНО

100% заряжено 75% - 100% 50% - 75% 0% - 25% 0%



Рекомендуется заряжать аккумулятор, как только уровень заряда достигнет 0%–25%. Если батарея разрядится, ваш Motif Luna® автоматически выключится.

4. Предупреждения и меры предосторожности



ВНИМАНИЕ: ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНАЯ СИТУАЦИЯ, КОТОРАЯ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНОЙ ТРАВМЕ.



ВНИМАНИЕ: ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНАЯ СИТУАЦИЯ, КОТОРАЯ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ЛЕГКИМ ТЕЛЕСНЫМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ.



Изготовлено для:
Motif Medical®, LLC
8 The Green, Suite 5601
Dover, DE 19901

Тел: (844) 272-8390
Эл. почта: info@motifmedical.com
Вебсайт: www.motifmedical.com

motif
MEDICAL