

# Motif Duo® Краткое руководство

## 1. Кнопки и функции

### ЖК-экран

- A Память
- B Таймер
- C Сцеживание
- D Питание
- E Батарея
- F Стимуляция
- G Уровень всасывания

### Кнопки управления


- H Кнопка питания
- I Кнопка повышения
- J Кнопка режима
- K Кнопка понижения



## 2. Подготовка молокоотсоса Duo


### Сборка молокоотсоса Duo

1. Вымойте руки, прежде чем прикасаться к компонентам молокоотсоса.
2. Поместите диафрагму на ее нижнюю часть так, чтобы поверхность с поперечными линиями была обращена к ней. Накройте ее верхней частью диафрагмы и поверните до фиксации.
3. Прикрепите шнурок к молокоотсосу с помощью кольца в нижней части основного корпуса. Проденьте шнурок через кольцо. Протяните шнурок, пока он не будет натянут.
4. Вставьте воронку в разъем.
5. Подсоедините клапан, прикрепив его к нижней части разъема воронки. Вкрутите в разъем бутылочку.
6. Накрутите собранную диафрагму на верхнюю часть разъема воронки.
7. Подсоедините трубку к порту корпуса молокоотсоса.
8. Подсоедините другой конец трубки к задней части собранной диафрагмы, вставив кончик верхней части диафрагмы в трубку.
9. Для очистки или хранения после использования открутите бутылочку от разъема воронки и накройте ее крышкой. Отсоедините трубку от диафрагмы и насоса. Открутите собранную диафрагму от разъема воронки. Снимите воронку с разъема. Следуйте инструкциям по очистке деталей молокоотсоса после каждого использования.

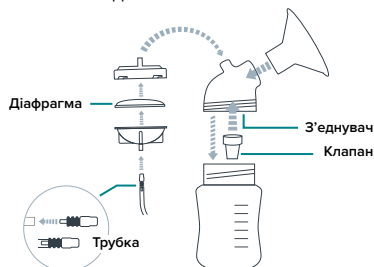


### 3. Использование молокоотсоса Duo

#### КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДВОЙНОЙ НАСОС

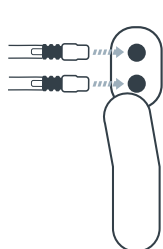

##### Режим двойного насоса

Чтобы использовать Duo в режиме двойного насоса, снимите заглушку с отверстия для подачи воздуха и подсоедините трубку из дополнительного комплекта для сбора молока.

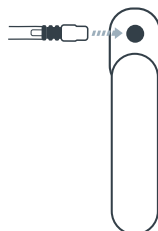

##### Режим одиночного насоса

При возврате в режим одиночного насоса обязательно закройте отверстие для подачи воздуха заглушкой

#### ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ МОЛОКООТСОСА DUO

1. **Нажмите кнопку питания.** Устройство включится, о чем свидетельствует загорание ЖК-экрана. Duo перейдет в режим стимуляции, чтобы ускорить сцеживание.
2. **Нажмите кнопку переключения режима.** Это переведет молокоотсос в режим сцеживания, как только молоко начнет течь.
3. **Отрегулируйте всасывание до желаемого уровня комфорта.**
4. **По возможности используйте молокоотсос с полностью заряженным аккумулятором.** Перед первым использованием подключите устройство к адаптеру питания и дайте молокоотсосу полностью зарядиться. Уровень заряда аккумулятора, отображаемый на ЖК-экране, может отличаться от фактической емкости аккумулятора. Немедленно зарядите аккумулятор, когда на ЖК-экране отобразится [Lo Bt]. Если молокоотсос не использовался в течение длительного периода времени, перед использованием убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен. Отсоедините адаптер питания от молокоотсоса сразу после завершения зарядки устройства.

#### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЖИМА ПАМЯТИ

1. **Нажмите кнопку питания** и удерживайте ее в течение 2 секунд, чтобы активировать функцию памяти. Значок “Память” начнет мигать, и молокоотсос начнет записывать сеанс сцеживания.
2. **Отрегулируйте настройки во время сеанса сцеживания так, как вам удобно.**
3. **Нажмите кнопку питания** еще на 2 секунды, чтобы остановить запись. Значок “Память” на экране показывает, что ваша программа сохранена.
4. Чтобы запустить программу сцеживания, **нажмите кнопку понижения** (ту же кнопку, которую вы нажимаете для уменьшения интенсивности всасывания) и удерживайте ее в течение 2 секунд.

### 4. Предупреждения и меры предосторожности



**ВНИМАНИЕ:** Потенциально опасная ситуация, которая может привести к серьезной травме.



**ВНИМАНИЕ:** Потенциально опасная ситуация, которая может привести к легким телесным повреждениям.



Изготовлено для: Motif  
Medical®, LLC  
8 The Green, Suite 5601  
Dover, DE 19901

Тел: (844) 272-8390  
Эл. почта: [info@motifmedical.com](mailto:info@motifmedical.com)  
Вебсайт: [www.motifmedical.com](http://www.motifmedical.com)

*motif*  
MEDICAL