

Motif BiliTouch™ Guia Rapida

1. Advertencias y Precauciones



Advertencia: Para evitar riesgos para la salud y reducir el riesgo de lesiones.

- Protección para los ojos: no mire directamente al LED. Durante el tratamiento, utilice siempre protección ocular para proteger los ojos del bebé.
- Revise periódicamente el protocolo de tratamiento y asegúrese de que los ojos del bebé estén protegidos de la contaminación.
- Los pacientes que estén cerca de la luz deben usar almohadillas o equipos protectores para proteger sus ojos.




Precaución: Puede provocar lesiones leves o daños en el producto o la propiedad.

- Utilice solo accesorios Motif Medical®.
- Verifique la protección para los ojos y la cubierta para ver si están desgastadas o dañadas antes de usarlas y reemplácese si es necesario. Evitar el uso si hay signos de daños o defectos.
- La protección para los ojos y la funda son desechables, se prohíbe su uso múltiple.
- Para mantener un rendimiento óptimo, se recomienda reemplazar los mismos periódicamente.

2. Piezas, Botones y Funciones


Caja de Control

1. Pantalla LCD
2. Botones de Funcionamiento
3. Unidad de Control
4. Salida Para Adaptador de Corriente
5. Salida Para Conexión de Almohadilla
6. Botón de Encendido y Apagado
7. Botón de Control de Intensidad de Luz
8. Botón de Aumento de 30 Minutos
9. Botón de Disminución de 30 Minutos

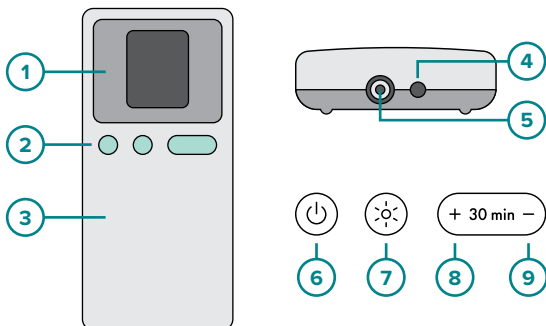

Pantalla LCD

10. Advertencia de Temperatura
11. Indicador de Carga
12. Estado de la Batería y Advertencia de Batería Baja
13. Tiempo de Funcionamiento
14. Tiempo Restante
15. Intensidad Lumínica

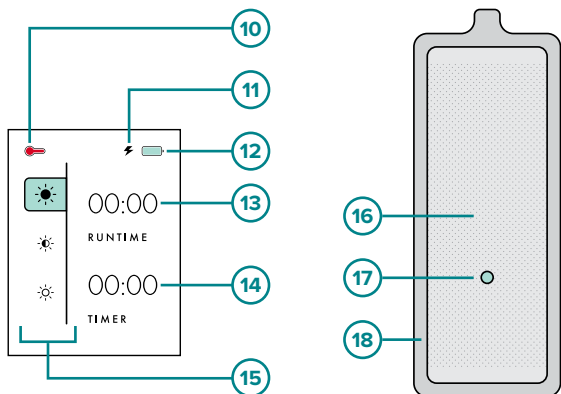


Almohadilla de Luz

16. Almohadilla de Luz
17. Sensor de Temperatura
18. Área Iluminada

3. Preparando el Dispositivo y Paciente


Antes de Usar

1. Asegúrese de que los símbolos de flecha en el conector de la almohadilla y la caja de control estén alineados, luego conéctese. Para desconectar, tire del collar de metal hacia la almohadilla de luz para desengancharlo.
2. Coloque la almohadilla de luz en la funda desechable. El área sin patrón debe tocar el lado blanco de la almohadilla de luz. Si dobla la almohadilla de luz como se muestra en la imagen y la inserta, será más fácil. Si la funda se ensucia durante el uso, deseche la funda y utilice una nueva. Si hay alguna sustancia extraña en la almohadilla de luz, debe lavarse de acuerdo con el “Capítulo 6: Mantenimiento y limpieza” antes de su uso.
3. Instale la protección ocular en los ojos del paciente.

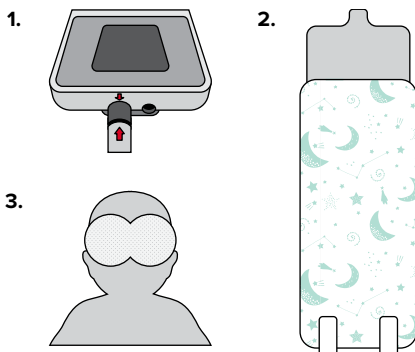


Colocación del Paciente

1. Como se muestra en la imagen, coloque al paciente sobre la almohadilla de luz envuelta con una cubierta. El área emisora de la almohadilla de luz debe mirar hacia arriba.
2. Después de doblar la almohadilla de luz por la mitad, fíjese con velcro. El cable de alimentación debe estar orientado al piso.

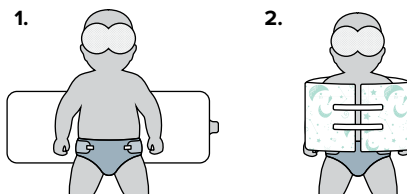

4. Uso del Dispositivo


Uso del Dispositivo en Modo Normal

Utilice el  botón para ajustar el nivel de intensidad y funcionará continuamente.

Uso del Dispositivo en Modo de Temporizador

Utilice el  botón para configurar el temporizador en incrementos de 30 minutos.

El temporizador se puede configurar por un máximo de 24 horas.

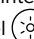Ajuste la intensidad de la luz en Alta o Baja usando el  botón.

Modo Normal



Modo de Temporizador

