



Motif Aura GlowTM Manual de Instrucciones

1. Introducción

Conozca el Motif Aura Glow™

Presentamos el Motif Aura Glow™ ¡nuestro nuevo sacaleches portátil diseñado para la comodidad y el confort! Brillo con un foco incorporado: ilumine su producción de leche con la luz integrada del sacaleches, facilitando el control en cualquier momento, de día o de noche.

Todos los productos de Motif Medical® adquiridos a través de distribuidores autorizados cuentan con una garantía del fabricante que establece que el producto estará libre de defectos de mano de obra y materiales durante 2 años para los sacaleches, durante 1 año para las baterías internas y durante 90 días para las piezas del sacaleches.

Asegúrese de registrar su sacaleches en cuanto lo reciba:
motifmedical.com/warranty-registration/



Índice

1.	Introducción	2
2.	Características principales	7
3.	Uso previsto (indicaciones de uso)	8
4.	Símbolos	9
5.	Seguridad	11
5.1	Prohibiciones, advertencias y precauciones	11
6.	Piezas	14
6.1	Qué incluye	14
6.2	Botones y funciones	16
6.3	Información sobre la batería	18
6.4	Ajustes y modos	19
7.	Esterilización y limpieza	21
8.	Cómo utilizar su sacaleches	24
8.1	Tamaño del protector mamario	26
8.2	Montaje sacaleches Motif Aura Glow™	27
8.3	Encendido y apagado del sacaleches Motif Aura Glow™	30

9.	Uso del sacaleches Motif Aura Glow™	31
9.1	Guía para la extracción	31
9.2	Preparándose para la extracción	32
9.3	Cómo llevar el sacaleches en el sujetador	33
9.4	Alineación del protector mamario	34
9.5	Extraer su leche	35
9.6	Después de la extracción	38
9.7	Conservar la leche materna	40
10.	Solución de problemas	42
10.1	Solución de problemas	42
10.2	Eliminación	44
10.3	Cuándo sustituir las piezas	45
11.	Información técnica	47
12.	Garantía	48



2. Características principales

Diseñado para caber en su sujetador, el Motif Aura Glow™ es manos libres, potente y discreto.

Sacaleches portátil

No hay necesidad de molestar con cables y tubos. Simplemente póngase el sacaleches con un sujetador estándar y extraiga leche cómodamente, con las manos libres.

New Pumping Modes

Includes two custom modes, designed by a lactation professional, to maximize milk collection and minimize the time spent adjusting pump settings.

Pantalla LCD retroiluminada

Pantalla fácil de leer que no cansa la vista.

Sistema cerrado

La protección contra reflujo mantiene limpio el motor, evitando la contaminación.

Batería recargable

Con una duración de la batería de 90 minutos entre cargas, el Motif Aura Glow™ es portátil, lo que permite un uso sencillo mientras se extrae leche sobre la marcha.

Brillo interior

Ilumine su producción de leche mientras se extrae leche gracias a luz integrada en el extractor.

Motor silencioso

Un zumbido bajo que no despertará a tu bebé.

Superligero

Pesa menos de medio kilo para una portabilidad perfecta.

3. Uso previsto (indicaciones de uso)

El sacaleches Motif Aura Glow™ está destinado a mujeres en periodo de lactancia para extraer y recoger leche materna. El Motif Aura Glow™ puede utilizarse como extractor simple o doble, y sólo está destinado al uso personal.

Por favor, lea este documento en su totalidad y siga las instrucciones al pie de la letra. Para evitar daños personales y materiales, por favor tenga en cuenta las advertencias e indicaciones de seguridad contenidas en este documento.



Advertencia: Para evitar lesiones leves

- Compartir un sacaleches puede provocar riesgos para la salud y anular la garantía del fabricante.

4. Símbolos



Advertencia: Situación potencialmente peligrosa que puede provocar lesiones graves.



Precaución: Situación posiblemente peligrosa que puede provocar lesiones corporales leves.



Aviso: Información útil o información que usted debe conocer al utilizar este producto



Fabricante



Fecha del fabricante



Número de serie



Número de catálogo del fabricante



Consulte el manual de instrucciones

IP22 Protección de entrada



Estado de la batería



DC



Transporte/Humedad de almacenamiento



Humedad de funcionamiento



Temperatura de funcionamiento



Temperatura de almacenamiento



Presión de funcionamiento



Transporte/Almacenamiento presión

4. SYMBOLS



Frágil



No amontonar



Hacia arriba



Mantener seco



Logotipo de buenas prácticas de fabricación



Pieza aplicada tipo BF (Lactancia materna)



Este producto no debe mezclarse con otros residuos comerciales para su eliminación



Botón de reproducción/pausa



Aumenta el nivel de succión



Disminuye el nivel de succión



Botón de modo



Botón de luz nocturna

5. Seguridad

5.1 Prohibiciones, advertencias y precauciones



Advertencia: Para evitar anulación de la garantía

- No modificar este equipo sin autorización del fabricante.
- No desmontar ni modificar el producto. El aparato no tiene piezas que el usuario pueda reparar.
- El uso de adaptadores de corriente distintos a los especificados en este manual del usuario puede causar daños internos en la bomba o hacer que ésta funcione incorrectamente. Por lo tanto, el uso de otros adaptadores de corriente anulará la garantía de su Motif.



Advertencia: Para reducir el riesgo de electrocución

- No utilizar durante el baño.
- No colocar ni almacenar el producto donde pueda caerse o ser arrastrado hacia una bañera o lavabo.
- No colocar ni dejar caer en agua u otro líquido.
- No tomar el producto si se ha caído al agua. Desenchufarlo inmediatamente de la toma de corriente.
- No desinfectar el kit en el horno microondas. Nunca sumergir el cuerpo principal en agua.



Advertencia: Para evitar incendios, electrocución o quemaduras graves

- No dejar el producto desatendido cuando está enchufado a una toma decorriente.
- Es necesaria una estrecha supervisión cuando este producto se utilice cerca de niños o personas con discapacidad.
- Colocar el producto fuera del alcance de los niños.
- Utilizar el producto únicamente para el uso previsto, tal y como se describe en este manual. No utilizar accesorios no recomendados por el fabricante.
- No utilizar nunca este producto si tiene el cable o el enchufe dañados, si no funciona correctamente o si se ha caído, dañado o sumergido en agua.

- Mantener el cable alejado de la superficie caliente.
- No utilizar nunca mientras se duerme o se está somnoliento.
- Nunca dejar caer ni introduzca ningún objeto en ninguna abertura.
- No utilizar en lugares donde se utilicen productos en aerosol o donde se administre oxígeno.
- No desmontar ni modifique el producto. Si lo desmonta una persona no autorizada, se anulará la garantía.
- No desenchufar el adaptador de corriente/cargador tirando del cable.
- No inhalar ni tragar las piezas pequeñas.
- Pueden producirse reacciones alérgicas.
- La pelusa, el polvo, la luz (incluida la luz solar), etc. pueden afectar a la seguridad y al rendimiento esencial.
- Evitar la luz solar directa y el polvo, y guardarlo en un lugar seco y fresco.
- Mantener fuera del alcance de los niños para evitar posibles asfixias o lesiones por ingestión de piezas pequeñas.



Advertencia: Para evitar riesgos para la salud y reducir el riesgo de lesiones

- Si usted es madre y está infectada por la hepatitis B, la hepatitis C o el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), la extracción de leche materna no reducirá ni eliminará el riesgo de transmitir el virus a su bebé a través de la leche materna.
- Antes de cada uso, inspeccionar visualmente los componentes individuales en busca de grietas, astillas, roturas decoloración o deterioro. En caso de que se observen daños en el aparato, dejar de utilizarlo hasta que se hayan sustituido las piezas.
- Este producto está destinado a ser utilizado por un solo usuario y no debe compartirse entre usuarios.
- No conducir mientras bombea.
- No utilizar nunca durante el embarazo, ya que el bombeo puede inducir el parto.
- Limpiar y desinfectar todas las piezas que entran en contacto con el pecho y la leche materna antes del primer uso.
- Lavar todas las piezas que entren en contacto con el pecho y la leche materna después de cada uso.

- No continuar extrayéndose leche durante más de 2 sesiones consecutivas si no se obtienen resultados.
- No descongelar la leche materna congelada en el microondas ni en una olla con agua hirviendo.
- Si alguna pieza se enmohece, dejar de utilizarla y sustituirla por piezas nuevas.



Precaución: Para evitar lesiones leves

- Extraer sólo con el sacaleches en posición vertical.
- Asegurarse de que el voltaje del adaptador de corriente es compatible con la fuente de alimentación.
- Enchufar primero el cable USB-C al sacaleches y luego a la toma de corriente.
- No utilizar limpiadores/detergentes antibacterianos o abrasivos para limpiar el sacaleches o sus piezas.
- No introducir nunca el motor del sacaleches en agua o en un esterilizador, ya que podría dañarlo de forma permanente.
- No intentar retirar el protector del pecho mientras se extrae leche. Apagar el sacaleches, romper el sello entre el pecho y el protector con el dedo y retirarlo del pecho.
- Si la extracción resulta incómoda o causa dolor, apagar el aparato, romper el sello entre el pecho y el protector con el dedo y retirar el protector del pecho.
- Las piezas de plástico del sacaleches se vuelven quebradizas cuando se congelan y pueden romperse al caerse.
- Las piezas del sacaleches pueden dañarse si se manipulan incorrectamente, por ejemplo, si se caen, se aprietan en exceso o se golpean.
- Tener cuidado al manipular las piezas del sacaleches.
- No utilizar la leche materna si los biberones o los componentes están dañados.

6. Piezas

6.1 Qué incluye


i Al desembalar la caja, asegúrese de que se incluyen todos los componentes siguientes.

- 1 Motor del sacaleches (2)
- 2 Diafragma de silicona (2)
- 3 Protectores mamarios (24 mm) (2)
- 4 Recogida de 180 ml Contenedores (2)
- 5 Válvula (2)
- 6 Insertos de brida (15 mm, 17 mm, 19 mm, 21 mm)
- 7 Cable de carga USB (2)
- 8 Ajustadores de tirantes de sujetador (2)

No aparece en la imagen:

Cepillo de limpieza (1)

Guardapolvos (2)

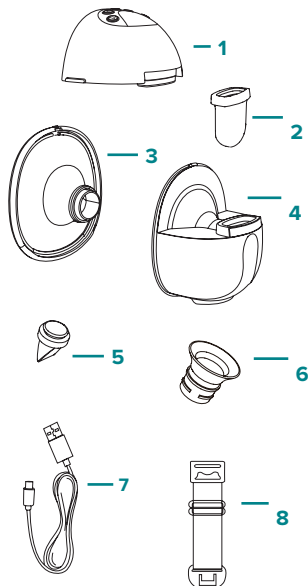

Accesorios y piezas adicionales disponibles para el sacaleches Motif Aura Glow™:


- Kit completo de reabastecimiento con piezas de repuesto
- Piezas individuales
- Protector mamario de 27 mm
- Insertos de brida: 14/13/12/11 mm
- Botellas Motif Aura Glow™
- Tetinas Motif Aura Glow™



Encuentre piezas de repuesto y suministros adicionales para Motif Aura Glow™ en:
motifmedical.com/replacement-supplies/

6.2 Botones y funciones

PANTALLA LCD

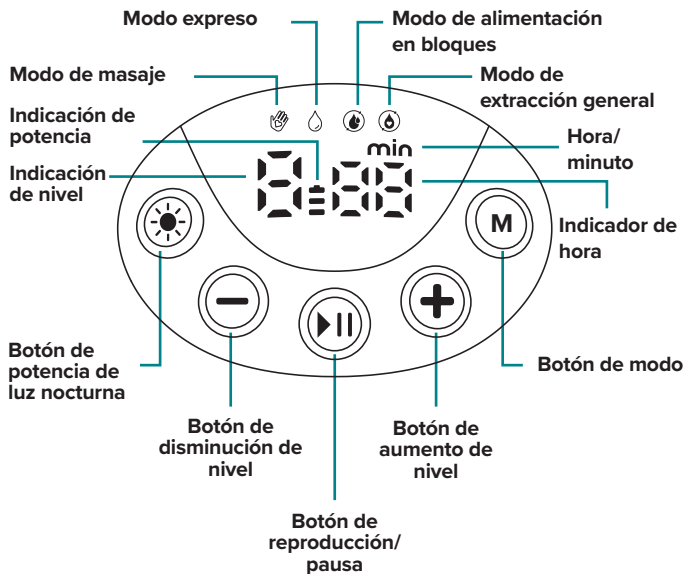

CONTROL DE BOTONES



Botón de reproducción/pausa

Mantener pulsado el botón de reproducción/pausa para encender o apagar el sacaleches.

Cuando el sacaleches está encendido, pulse brevemente el botón de reproducción/pausa para pausar o desactivarlo.



Botón de aumento de nivel

Haga una pulsación corta para aumentar el nivel de vacío (succión) durante cualquier modo.



Botón de disminución de nivel

Haga una pulsación corta para disminuir el nivel de vacío (succión) durante cualquier modo.



Botón de luz nocturna

Mantenga pulsado el botón de la luz nocturna para ajustar el brillo de la luz al nivel que prefiera. A continuación, realice una pulsación corta para encenderla o apagarla. El sacaleches recuerda el ajuste de la luz.

Nota: La luz nocturna se apagará automáticamente después de 30 segundos. La luz nocturna se controla independientemente del sacaleches y no se apaga cuando el sacaleches está apagado.



Botón de modo

Haga una pulsación corta para cambiar entre los modos del sacaleches.

6.3 Información sobre la batería

DIFERENTES NIVELES DE CARGA



Batería baja



1/3 de carga

*Conectar
pronto el cable
USB*



2/3 de carga



**Carga
completa**

*Tiempo de
funcionamien-
to: 90 min
aprox.*

AL CARGAR

Las tres barras parpadean durante la carga. Cuando la batería está completamente cargada, las tres barras están encendidas y no parpadean.



Por favor, cargue el sacaleches cuando sólo haya 1 barra en la pantalla de la batería y esté parpadeando. No utilice el sacaleches durante la carga.



Después de cada uso, compruebe el nivel de carga de la batería pulsando el botón de encendido. Si la batería está baja, cárguela con un cargador DC 5V = 1A.

6.4 Ajustes y modos

Ajustes de succión

El nivel de extracción de su sacaleches se refiere a la fuerza de succión. Cuando utilice su Motif Aura Glow, normalmente comprobará que la extracción es más eficaz con el nivel de succión más alto con el que se sienta cómoda.

Es importante no ajustar un nivel de succión muy alto que la haga sentir incómoda, ya que el dolor resultante dificultará el flujo de leche.

El Motif Aura Glow tiene 4 modos de succión. Los modos de masaje, expreso y extracción general tienen 9 niveles. El modo de alimentación en bloques tiene 5 niveles.

Modos estándar

Modos clásicos para una descarga y una extracción de leche eficaces.



Modo de masajes

Patrón de succión con ciclos rápidos y vacío bajo para ayudar con la extracción y para iniciar el flujo de leche.

- El modo de masaje tiene 9 niveles de succión



Modo expreso

Patrón de succión con ciclos más lentos y mayor vacío para extraer la leche con suavidad y eficacia.

- El modo expreso tiene 9 niveles de succión

Modos especializados

El Motif Aura glow™ incluye 2 modos diseñados con una consultora internacional de lactancia certificada (IBCLC).



Modo de alimentación en bloques

Modo de extracción de potencia mínima que imita la alimentación en bloques de un recién nacido para ayudar a aumentar la producción de leche. La lactancia en bloques se produce de forma natural cuando un bebé mama varias veces en un breve periodo de tiempo, realizando únicamente pausas rápidas, lo que indica al cuerpo que debe producir más leche. Dentro de cada nivel, este modo incluye 3 pasos de extracción con pausas de succión baja entre ellos.

- El modo de alimentación en bloques tiene 5 niveles de succión



Modo de extracción general

Modo de uso diario que comienza en modo de masaje y cambia a modo expreso al cabo de 2 minutos. Esto se repite dos veces para 2 extracciones.

Después de succionar con los modos de masaje estándar y expreso en este sacaleches, utilice el mismo nivel de modo expreso con el modo general de extracción para obtener la misma fuerza de succión.

- El modo general de extracción tiene 9 niveles de succión

7. Esterilización y limpieza



Antes del primer uso, esterilice cada parte de:

- El diafragma
- Las válvulas
- Insertos de bridas
- Los protectores mamarios
- Los recipientes de recolección

Repita la esterilización de las piezas enumeradas una vez al día después del uso del sacaleches.

Instrucciones de esterilización

1. Si las piezas se han utilizado anteriormente, siga primero las instrucciones de limpieza.
2. Coloque las piezas del sacaleches en una olla y cúbralas con agua.
3. Lleve el agua a ebullición y deje hervir durante cinco minutos.
4. Retire las piezas con unas pinzas limpias.
5. Coloque las piezas del sacaleches sobre una toalla de papel limpia o un paño de cocina y deje que se sequen al aire completamente.



No esterilice utilizando un microondas, ya que podría provocar pérdidas en el conjunto brida-vaso colector.

Instrucciones de limpieza

1. Lávese bien las manos con agua caliente y jabón.
2. Desmonte todas las piezas del sacaleches que hayan estado en contacto con la leche materna. Esto incluye válvulas, diafragmas, protectores mamarios, recipientes de recogida e insertos de brida.
3. Enjuague cada pieza con agua fría para eliminar los restos de leche.
4. Opciones de lavado de piezas del sacaleches:
 - Lave cada pieza por separado en el lavabo con un cepillo suave y jabón. (Asegúrese de utilizar un cepillo o paño nuevo exclusivamente para las piezas del sacaleches).
 - Sumerja cada pieza en agua tibia y jabón durante 5 minutos y, a continuación, aclárelas bien.
5. Seque cada pieza con una toalla limpia o deje que se seque completamente al aire sobre una superficie higiénica, como una toalla de papel limpia o un paño de cocina limpio. No seque con palmaditas.
6. Limpie el exterior del motor del sacaleches con una toalla seca y limpia. *No lave el exterior del sacaleches con agua ni lo moje cuando lo limpie.



No se recomienda lavar y secar las piezas del sacaleches Motif en el lavavajillas. No existe una temperatura estándar para los lavavajillas y algunos pueden deformar las piezas. Las piezas dañadas en el lavavajillas no están cubiertas por la garantía.

Después de cada uso

1. Lávese bien las manos antes de manipular cada componente del sacaleches.
2. Desmante cada pieza que entre en contacto con la leche materna, incluyendo la válvula, el diafragma, el protector mamario, el recipiente de recogida y el inserto de brida.
3. Enjuague cada pieza en agua fría para eliminar los restos de leche.
4. Opciones de lavado de piezas individuales::
 - Lave cada parte por separado con un cepillo suave o un paño de cocina limpio.
 - Sumerja cada pieza en agua tibia y jabón durante 5 minutos y, a continuación, enjuáguelas bien.
5. Seque cada pieza con una toalla limpia y/o déjelas secar completamente al aire en una superficie higiénica.
6. Limpie el cuerpo principal con una toalla seca y limpia después de cada uso. *Nunca utilice agua para lavar el exterior del sacaleches.
7. Guarde las piezas después de que se sequen completamente en una bolsa o contenedor limpio. *No guarde las piezas húmedas.

8. Cómo utilizar el sacaleches

8.1 Tamaño del protector mamario

ENTENDER EL TAMAÑO

La extracción de leche no debe doler. Esta guía es un punto de partida para ayudarle a determinar el tamaño óptimo del protector mamario en función del diámetro de su pezón.


Cómo encontrar el protector mamario adecuado para usted

Step 1

Utilizando una regla, una cinta métrica o una herramienta para medir bridas, mida el diámetro de la boquilla en la parte más ancha (normalmente la base) en milímetros (mm). Mida antes de extraer. **No incluya la areola.** Es importante medir ambos pezones, ya que pueden tener tamaños diferentes.

Step 2

Sume 0-3 mm al tamaño de su pezón para determinar el tamaño de su protector mamario. Su pezón debe moverse con facilidad en el túnel del protector mamario y ningún areola u otro tejido mamario debe entrar en el túnel del protector mamario. Puede que necesite probar más de una talla para encontrar el ajuste más cómodo y eficaz.

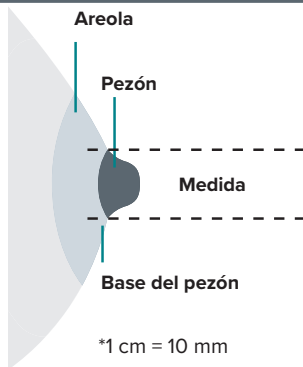


Ejemplo: Si el diámetro de su pezón mide 16 mm, la gama de tallas del protector mamario sería de 16 mm a 19 mm.

El sacaleches se suministra con un protector mamario de 24 mm y otro de 15 mm, insertos de 17 mm, 19 mm y 21mm. Los protectores mamarios de 27 mm están disponibles por separado.


Consulte a continuación el tamaño recomendado del protector mamario en función de sus medidas. La mayoría de las madres consideran que añadiendo 0-3 mm a la medida de su pezón consiguen un ajuste cómodo y eficaz de la brida.

COMPRUEBE LA TALLA DE SU PROTECTOR MAMARIO

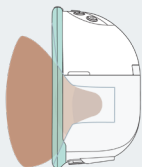


Buen tamaño

La extracción es cómoda y eficaz.

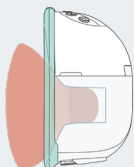

Demasiado pequeño

La extracción es dolorosa al rozar. Pruebe un tamaño más grande.

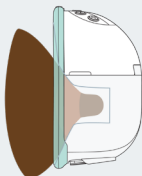

Demasiado grande

La areola está siendo introducida en el túnel de la brida. Solo la boquilla debe entrar en el túnel de la brida.

TABLA DE TAMAÑOS DE BRIDAS E INSERTOS

Brida	Se adapta a los pezones
11	8-11 mm
12	9-12 mm
13	10-12 mm
14	11-14 mm
15	12-15 mm
16	13-16 mm
17	14-17 mm
19	16-19 mm
21	18-21 mm
24	21-24 mm
27	24-27 mm

¿Debería probar un nuevo tamaño de protector mamario o de brida?

- ¿Su pezón roza los lados del túnel hasta el punto de causar molestias?
- ¿Ve un exceso de areola dentro en el túnel?
- ¿Ve alguna rojez?
- ¿Se le está poniendo blanco el pezón o la areola?
- ¿Siente que la leche no fue extraída después de la succión?

Si ha respondido “Sí” a alguna de estas preguntas, considere la posibilidad de probar una nueva talla siguiendo las instrucciones de medición anteriores.

Si aún no está segura de haber elegido la talla correcta, acuda a un asesor en lactancia o a un especialista en lactancia materna para que le ayude a elegir el protector mamario del tamaño adecuado.

8.1 Montaje del sacaleches Motif Aura Glow™


1. Asegúrese de limpiar el sacaleches siguiendo las instrucciones de este manual de usuario. Para evitar pérdidas, elimine cualquier residuo alrededor del borde antes de ensamblar. Lávese bien las manos antes de montar los componentes limpios.
2. Instale la válvula en el recipiente colector, prestando atención a la dirección de instalación.




3. Coloque el diafragma de silicona en el recipiente de recogida y presione firmemente para garantizar un sellado perfecto.




4. Para instalar el protector mamario en el contenedor de recogida, asegúrese de alinear la ranura de desviación del protector mamario con la ranura de reflujo del contenedor de recogida y, a continuación, presione los bordes con ambas manos para asegurarse de que el sellado está en su sitio.

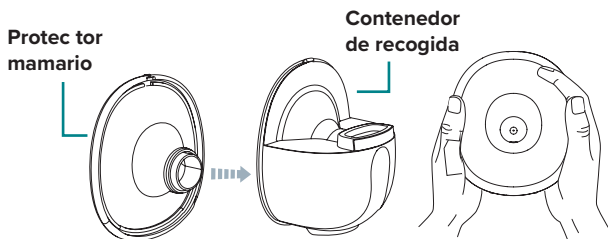

5. Mida su pezón con la regla para pezones incluida. Añada 0 - 3 mm para encontrar el tamaño de su tetina. Añada el inserto de brida si es necesario.

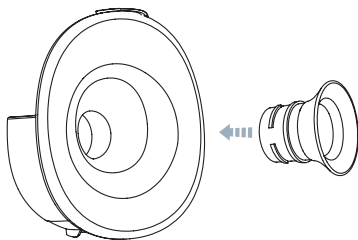


6. Coloque el tapón de leche en la parte superior del recipiente de recogida, asegurándose de que el tapón esté perfectamente alineado con el pico vertedor. Presione el tapón con firmeza para garantizar un cierre hermético y que no haya pérdidas de leche.

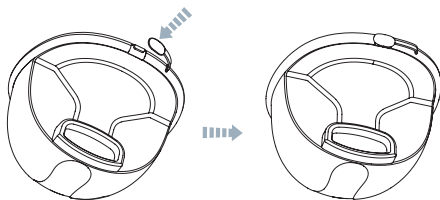

7. Instale el motor del sacaleches en el recipiente de recogida alineando la muesca situada bajo el cuerpo principal con la membrana de silicona y presionando firmemente hacia abajo para garantizar un sellado completo.

Motor de la bomba

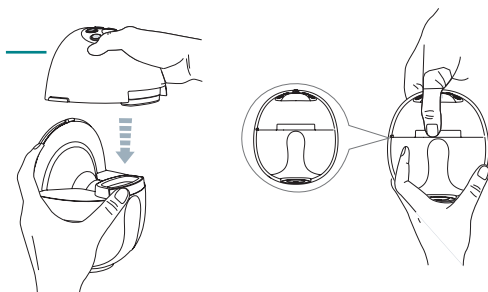

8.2 Encendido y apagado del sacaleches Motif Aura Glow™



Pulse el botón REPRODUCCIÓN/PAUSA

Pulse prolongadamente el botón de reproducción/pausa para encender el sacaleches. Pulse brevemente el botón de reproducción/pausa para encender la bomba.



Pulse el botón MODO

Pulse el botón de modo para cambiar de modo.



Ajuste el nivel de succión al nivel de comodidad preferido



Pulse el botón REPRODUCCIÓN/PAUSA

Pulse prolongadamente el botón de reproducción/pausa para apagar el sacaleches.



El sacaleches recuerda los ajustes de succión que utilizó durante su última sesión. Cuando el sacaleches se enciende de nuevo, se inicia automáticamente en el modo y el nivel que utilizó la última vez.



Cargue la batería inmediatamente cuando el símbolo de la batería parpadee en la pantalla.

Si el sacaleches permanece sin usarse durante un largo periodo de tiempo, asegúrese de que la batería está completamente cargada antes de utilizarlo. Desenchufe el adaptador de corriente del extractor de leche inmediatamente después de terminar de cargar el dispositivo.

9. Uso del sacaleches Motif Aura Glow™

9.1 Guía del sacaleches



Aunque utilice el sacaleches, se recomienda dar el pecho al bebé siempre que pueda.


- Masajee suavemente sus pechos o aplique compresas calientes desde el pecho hacia el pezón antes de empezar la sesión de extracción.
- Extraiga leche de cada pecho durante 10 - 15 minutos. Se recomienda extraerse leche con frecuencia en lugar de hacerlo durante mucho tiempo. (Cada 2 - 3 horas, 8 veces al día).

9.2 Preparándose para la extracción

1. Compruebe si está utilizando el protector mamario o el inserto de brida del tamaño correcto. Consulte la sección 8.1 Tamaño del protector mamario para obtener más detalles.
2. Lávese bien las manos.
3. Compruebe si cada componente está desgastado o dañado antes de utilizarlo y vuelva a colocar las piezas cuando sea necesario.
4. Monte el sacaleches como se describe en 8.2 Montaje del sacaleches.
5. Compruebe el nivel de la batería del sacaleches para asegurarse de que está completamente cargada.
6. Coloque el sacaleches sobre el pecho, debajo del sujetador. Ajuste la longitud de los tirantes del sujetador o utilice los ajustadores de los tirantes del sujetador para que la extracción resulte más cómoda. Consulte la sección 9.3 Cómo llevar el sacaleches en el sujetador para obtener más información.
7. Asegúrese de que la boquilla está correctamente centrada en el túnel. Consulte la sección 9.4 Alineación del protector mamario para más detalles.

9.3 Cómo llevar el sacaleches con un sujetador

1. Coloque el sacaleches sobre el pecho, debajo del sujetador.
2. Ajuste la longitud de los tirantes del sujetador para que la succión sea más cómoda. Si los tirantes del sujetador no son lo suficientemente largos, utilice el ajustador de tirantes del sujetador para que la succión sea más cómoda.
3. Con el extractor centrado en el pezón, enganche un extremo del ajustador de tirantes en el sujetador de lactancia y enganche el otro extremo del sujetador en el ajustador de tirantes del sujetador.

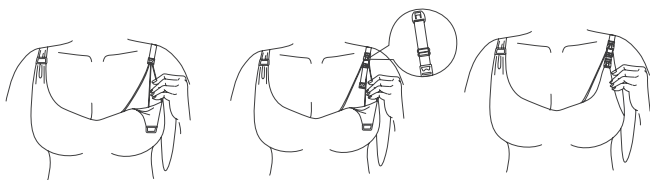


9.4 Alineación del protector mamario

Centre el protector mamario en el pecho de modo que el pezón quede introducido en el túnel del protector.

Es importante que el protector mamario esté colocado correctamente antes de comenzar la extracción para evitar cualquier dolor que pueda producirse por el roce o la torsión del pezón en el lateral del protector.


Si se extrae leche dos veces, coloque también el segundo protector. Si le preocupa el ajuste o quiere asegurarse de que se ha colocado correctamente el protector mamario, consulte la sección “Compruebe su tamaño de protector mamario” del apartado 8.1 Tamaño del protector mamario.

Aunque es posible que sienta alguna molestia al utilizar un sacaleches por primera vez, el uso de un sacaleches no debe causar dolor. Si no está segura del tamaño del sacaleches, póngase en contacto con un profesional sanitario o un representante de Motif Medical® que pueda ayudarle a conseguir un ajuste adecuado.

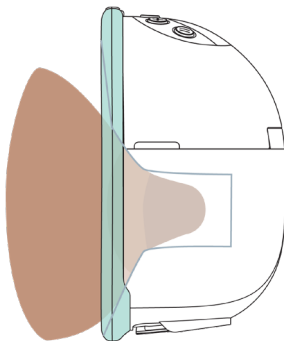





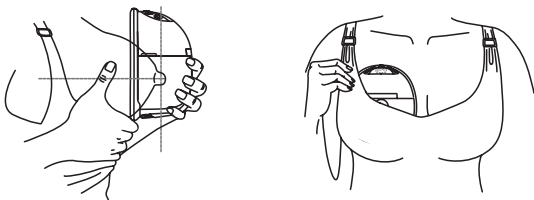

9.5 Cómo extraer su leche


1. Presione firmemente el protector contra el pecho, sin dejar huecos y asegurándose de que el pezón está centrado. Mantenga el sacaleches en posición vertical.






2. Mantenga pulsado el botón  REPRODUCCIÓN/PAUSA para poner en marcha el sacaleches. La pantalla se iluminará.

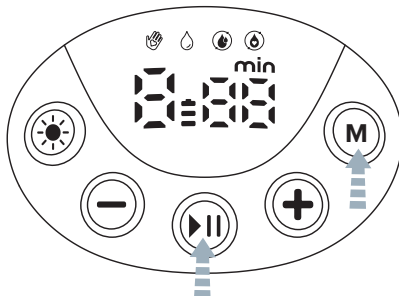


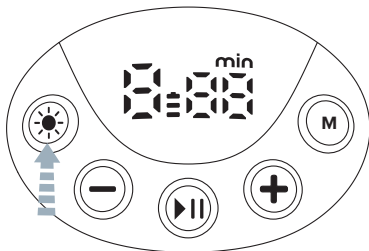
3. Presione brevemente el botón  REPRODUCCIÓN/PAUSA para empezar la extracción. Pulse el botón  MODO para cambiar entre modos luego de empezar a extraer. Hay cuatro modos: masaje , expreso , alimentación en bloques , y extracción general .




4. Hay 9 niveles en los modos de masaje, expreso y extracción general. Hay 5 niveles en el modo de alimentación en bloques. Puede elegir la succión que le resulte más cómoda pulsando brevemente los botones  AUMENTAR y  DISMINUIR.

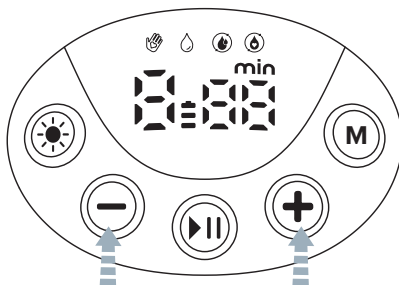

5. Pulse brevemente la tecla  para encender la luz nocturna y comprobar los niveles de leche.




6. Mantenga pulsado el botón  REPRODUCCIÓN/PAUSA para apagar el sacaleches.

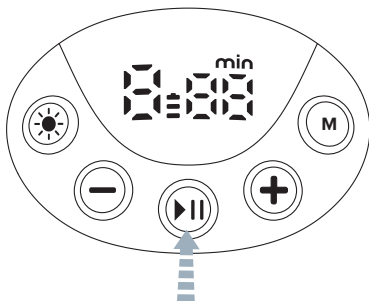


9.6 Después de Bombeo

1. Cuando termine de extraerse leche, mantenga pulsado el botón REPRODUCCIÓN/PAUSA para apagar el sacaleches y deslice un dedo entre el pecho y el protector para separarlos. Retire con cuidado el sacaleches del pecho manteniéndolo en posición vertical.

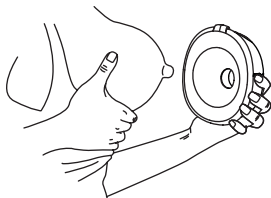


2. Tire suavemente hacia atrás de la parte superior del protector mamario y extraiga el motor del sacaleches del recipiente de recogida utilizando las aletas del lateral.

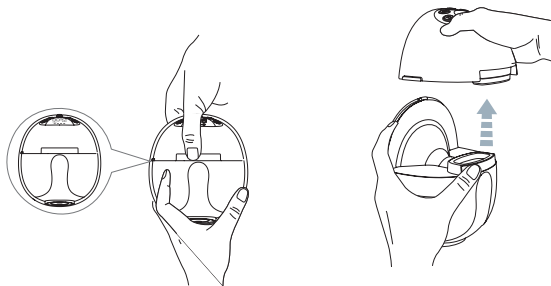

No vierta la leche del recipiente de recogida con el motor aún acoplado.

3. Retire el tapón del pico vertedor. Para evitar que se derrame la leche, alinee con cuidado el pico vertedor con la botella y vierta la leche en la botella.

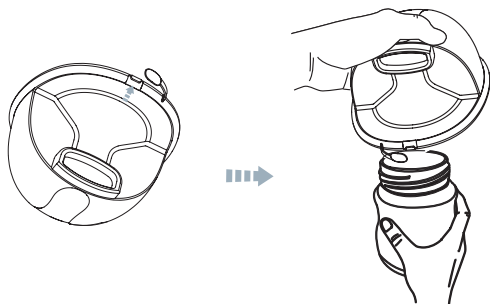

No guarde la leche en el recipiente de recogida.

9.7 Almacenamiento de la leche materna

- i** Cuando guarde la leche materna en una bolsa, asegúrese de utilizar únicamente rotuladores no tóxicos para escribir en ella.

		Ubicaciones/temperaturas de almacenamiento		
		Temperatura de la habitación 77°F (25°C) O más frío	Refrigerador 40°F (4°C)	Freezer 0°F (-18°C) más frío
Tipo de leche materna	Recién extraída o bombeada	0 - 4 horas	0 - 4 días	0 – 6 meses es mejor 6 – 12 meses es aceptable
	Descongelado (previamente congelada)	1-2 horas	0 - 24 horas (un día)	* Nunca volver a congelar leche humana luego de que ha sido descongelada
	Sobras de una toma (el bebé no se ha terminado el biberón)	0 - 2 horas luego de que el bebé haya terminado de alimentarse		

Source: CDC.gov

How to Thaw Breast Milk

1. Asegúrese siempre de comprobar la fecha del envase de la leche antes de utilizarla. No utilice leche sin fecha, ni leche que haya estado almacenada más tiempo del recomendado.
2. Descongele la leche congelada en el refrigerador o bajo un chorro de agua fría.
3. Caliente la leche bajo un chorro de agua caliente y agite suavemente el recipiente para mezclar la leche. Asegúrese de no agitar el envase.
4. Si no se dispone de agua caliente, caliente una olla con agua en el fuego. Cuando el agua esté caliente, pero no hirviendo, retire el cazo del fuego y coloque el recipiente de la leche en él. Nunca caliente el recipiente directamente sobre el fuego.
5. Nunca cocine la leche materna en el microondas, ya que éste puede provocar puntos calientes peligrosos que podrían quemarla a usted o a su bebé.
6. Compruebe siempre la temperatura de la leche en el interior de su muñeca antes de dársela al bebé. La leche debe estar templada, no caliente.
7. Una vez descongelada, la leche debe conservarse en el refrigerador durante un máximo de 24 horas.
8. No vuelva a congelar la leche descongelada. Deseche la leche previamente congelada que no se utilice en 24 horas.

10. Solución de problemas

10.1 Solución de problemas

Condición	Posibles Causas	Soluciones
Succión baja o nula	Avería del motor del sacaleches	Pruebe la potencia de succión: separe el cuerpo principal de la taza, coloque el cuerpo principal en la palma de la mano y compruebe si hay succión en la palma de la mano. Si no hay succión, hay un problema con el motor del sacaleches.
	Instalación incorrecta	Compruebe si la válvula, el diafragma y el protector mamario están dañados y asegúrese de que están correctamente conectados. Desmonte y vuelva a montar correctamente.
	Tamaño incorrecto del protector mamario	Compruebe que utiliza la talla del protector mamario. Si el protector mamario está dañado, sustitúyalo por uno nuevo.
Demasiada succión, dolor al extraer	Nivel de succión demasiado alto	Ajuste el nivel de succión más bajo y consulte a su especialista en lactancia o a su médico.
	Tamaño incorrecto del protector mamario	Los pezones pueden doler al extraer leche. Compruebe que el protector mamario o la brida son del tamaño adecuado.

Pérdidas de leche	Brida no sellada	Pase los dedos alrededor del exterior del protector mamario y presione firmemente para sellarlo al recipiente de recogida.
	Kit de montaje defectuoso	Examine el protector mamario y el recipiente de recogida para comprobar si presentan daños. Si se aprecia algún daño, sustitúyalos por piezas nuevas.
Sin energía	Batería baja	Deje que el sacaleches se cargue durante 2 horas completas utilizando un adaptador de corriente certificado de 5 V y vuelva a intentarlo.
No es silencioso		El sacaleches producirá algún sonido dentro del rango estándar de 45-55 dB.
Decoloración/ deformación	Limpieza incorrecta o piezas viejas	Siga las instrucciones de limpieza de este manual. Mantenga las piezas alejadas del calor o de la luz solar directa. Si se aprecia algún daño en las piezas, sustitúyalas por otras nuevas.



Si necesita ayuda adicional para solucionar problemas con su sacaleches, póngase en contacto con el Departamento de Atención al Cliente de Motif Medical®. Puede acceder a él en línea en [motifmedical.com](https://www.motifmedical.com) a través del chat, por correo electrónico en hello@motifmedical.com o por teléfono (844) 272-8390.

10.2 Eliminación

Envíe los componentes que ya no utilice a Motif Medical® o deseche correctamente el dispositivo de acuerdo con la normativa local, estatal y federal.



Como equipo eléctrico y electrónico, el dispositivo debe eliminarse de acuerdo con un procedimiento especializado para recogida, retiro y reciclado o destrucción de conformidad con la Directiva 2012/19/UE del Consejo Europeo sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos [RAEE].

10.3 Cuándo sustituir las piezas

La frecuencia con la que debe sustituir los suministros del sacaleches puede variar en función de la frecuencia con la que lo utilice. Por ejemplo, una madre que se extrae leche exclusivamente unas 9 veces al día y desinfecta sus piezas con más frecuencia que una madre que solo se extrae leche 3 o 4 veces al día necesitará sustituir sus piezas más a menudo.



Una buena referencia a tener en cuenta es sustituir las piezas cada 90 días.

Sustitución de las válvulas

Las válvulas de silicona deben sustituirse entre 1 y 3 meses en función de la frecuencia de uso, ya que pueden afectar a la potencia de succión.

- Es importante recordar que las piezas más pequeñas del sacaleches pueden no mostrar daños visibles.

Sustitución de los diafragmas

Los diafragmas pueden estirarse y perder elasticidad con el tiempo, lo que los hace menos eficaces para mantener la humedad fuera del motor del sacaleches.

- Deben sustituirse entre 3 y 6 meses en función del uso.
- Si observa algún desgarró, deformación, rasgadura o decoloración, es hora de sustituirlos.

Sustitución de los protectores mamarios de silicona y los insertos de brida

Sus insertos de silicona acumularán residuos, pueden agrietarse o decolorarse con el tiempo, dependiendo de la frecuencia con la que se extraiga leche.


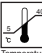





- Deben sustituirse cada 6 meses.
- No obstante, vigile si hay grietas, roturas o deformaciones, ya que podrían indicar que es necesario sustituirlo antes.
- La decoloración no afectará al funcionamiento del sacaleches, pero puede resultar desagradable a la vista.

Sustitución de los contenedores de recogida

Sus recipientes de recogida acumularán residuos, pueden agrietarse o decolorarse con el tiempo en función del tiempo que succione.

- Deben sustituirse cada 6 meses.
- No obstante, vigile si se producen crujidos, desgarros o deformaciones, porque eso podría indicar que hay que sustituirlo antes.
- La decoloración no afectará al funcionamiento del sacaleches, pero puede resultar desagradable a la vista.

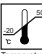10.4 Información técnica

Contenido	Descripción	
Tensión y frecuencia nominales	IEntrada: 5 V, 1 A	
Batería / Vida útil	3,7 V, 1000 mAh, litio, 90 minutos	
Protección contra descargas electrónicas	Clase II,  TIPO BF: Protector mamaio	
Grado de protección contra la penetración de agua	Clasificación IP: IP22	
Características generales de la extracción		
Modo de funcionamiento (funcionamiento continuo)	Modo expreso, modo de masaje, modo de alimentación en bloques, modo de extracción general	
Niveles de succión	Modo expreso	1 - 9 Niveles
	Modo de masaje	1 - 9 Niveles
	Modo de alimentación en bloques	1 - 5 Niveles
	Modo de extracción general	1 - 9 Niveles
Ciclos de succión	CPM fijo	
Función temporizador	Apagado automático (30 min ± 1 min)	
Ruido	< 45 dB	
Protección contra reflujo	Sí	
Condiciones de funcionamiento		
Temperatura ambiente	41 a 104°F	  
Humedad relativa	15 a 90%	
Presión del aire	90 a 106 kPa	
Condiciones de transporte y almacenamiento		
Temperatura ambiente	-4 a 140°F	  
Humedad relativa	15 a 90%	
Presión del aire	90 a 106 kPa	

10.5 Garantía

Asegúrese de registrar su sacaleches en cuanto lo reciba en:
motifmedical.com/product-registration

Todos los productos Motif Medical® adquiridos en comercios autorizados tienen una garantía del fabricante que establece que el producto estará libre de defectos de fabricación y materiales durante 2 años para los sacaleches eléctricos dobles, durante 1 año para las baterías internas y durante 90 días para las piezas del sacaleches y el sacaleches manual.

La única obligación de Motif bajo esta garantía expresa será, a discreción de Motif, reemplazar o reparar el producto o pieza(s) del mismo (en caso de que el producto no esté disponible, entregar un tipo de producto similar).

La garantía comienza en la fecha de compra probada y es una garantía única que finaliza a partir de esta fecha de inicio. La garantía no se amplía si se sustituye el producto. La garantía no es transferible. Los sacaleches Motif son monousuarios y la garantía sólo se aplica al usuario original del sacaleches.

La garantía cubre los defectos de fabricación. Motif Medical® no puede sustituir una pieza del sacaleches que haya sido dañada por el usuario final durante el uso del sacaleches. La garantía no cubre los artículos perdidos o robados, el desgaste normal de las piezas del sacaleches, ni los artículos que hayan sido mal utilizados, maltratados o almacenados incorrectamente. El incumplimiento de las instrucciones de uso o las modificaciones realizadas en el producto anularán la garantía.

Los productos en garantía se envían por tierra. Los envíos urgentes, de un día para otro y de dos días están disponibles por un cargo adicional. La garantía sólo es válida en Estados Unidos. Los artículos en garantía sólo se enviarán a direcciones en EE. UU.



Si tiene alguna pregunta sobre la garantía, puede llamar al 844-272- 8390, visitarnos en línea en motifmedical.com o enviar un correo electrónico al servicio de atención al cliente ahello@motifmedical.com





Manufactured for:

Motif Medical®, LLC
8 The Green, Suite 5601
Dover, DE 19901

Phone: (844) 272-8390

Email: info@motifmedical.com

Web: www.motifmedical.com

Gracias por elegir
el sacaleches Motif
Aura GlowTM

(844) 272-8390
info@MotifMedical.com
www.motifmedical.com

Motif Medical®
8 The Green, Suite 5601
Dover, DE 19901